

ISO-K

ALGINATE – BASED SEPARATING LIQUID

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Изолирующая жидкость для любых пластмасс**Введение**

Уважаемый покупатель!

Мы очень рады, что Вы выбрали материал ISO-K. CANDULOR ISO-K представляет собой изолирующую жидкость на основе водного раствора альгината и предназначена для изоляции пластмасс от гипса или гипса от гипса.

При правильном применении ISO-K позволяет удобно распаковывать пластмассовую конструкцию без налипания гипса.

Указания по работе

Условием достижения успешного результата является полное вываривание воска кипятком (при необх. использовать средство для удаления воска) и тщательное смачивание гипсовой модели/матрицы/контрштампа. Для удаления возможных следов воска и жира желательно промывать модель кипящей водой без моющего средства.

Наносить ISO-K мягкой кисточкой на тёплую или уже остывшую модель. Внимание! При нанесении ISO-K модель не должна быть слишком горячей! Равномерно нанести изоляцию, не допуская образования "лужиц". После полного высыхания 1-го изолирующего слоя обязательно нанести 2-й слой. Особенно важно следить за тем, чтобы первый нанесённый слой полностью высох до нанесения второго слоя. Не сдувать остатки жидкости сжатым воздухом!

Полезный совет:

Гипсовую модель/матрицу/контрштам следует поместить в теплую воду (40-45°C) не менее чем на 15 минут.

Перелив ISO-K в небольшую ёмкость, наносить материал мягкой волосяной кисточкой, предварительно смоченной водой.

После использования следует тщательно промыть кисточку под струёй воды.

Примечание

Образование осадка не влияет на изолирующее действие. Помутнение и осадок можно легко устранить, просто взболтав изолирующую жидкость.

Хранение

Допустимая температура помещения: 2 - 28°C / 36 - 82°F

Стабильность при хранении

3 года при надлежащих условиях хранения.

„Соблюдать указания на этикетке!“

Форма выпуска

559537 – ISO-K синий 500 мл

559538 – ISO-K синий 1000 мл

559539 – ISO-K синий 5000 мл

559540 – ISO-K розовый 500 мл

559541 – ISO-K розовый 1000 мл

559542 – ISO-K розовый 5000 мл

Предупреждение

Материал разработан специально для применения в стоматологии. Использовать в соответствии с указаниями по работе. Производитель не несёт ответственности за ущерб, связанный с несоблюдением указаний по работе и области применения. Это относится в том числе к случаям смешивания или совместного использования данного продукта с продуктами конкурирующих фирм. Кроме того, потребитель обязан перед использованием материала проверить его на соответствие планируемой цели использования, особенно в случаях, если эти цели не указаны в инструкции по применению.

Create the best

CANDULOR AG

Boulevard Lilienthal 8
CH – 8052 Glattpark (Opfikon)

T +41 (0)44 805 90 00

F +41 (0)44 805 90 90

candulor.com

candulor@candulor.ch



<https://stomshop.pro>