



БРОНЯ 100.0 ТИГЕЛЬ

**Этикетка
АВЕ 607.600.000 ЭТ**

Средство БРОНЯ 100.0 ТИГЕЛЬ предназначено для продления ресурса тиглей - обработанные им тигли выдерживают большее количество плавов.

Комплектность:

- порошок для обработки тиглей 5 г
- контейнер транспортировочный 1 шт
- этикетка АВЕ 607.600.000 ЭТ 1 шт

Применение.

В 100 мл дистиллированной воды тщательно размешать содержимое контейнера до получения однородной суспензии. Кистью с натуральной щетиной обработать полученным составом внутреннюю поверхность тигля.

Высушить тигель в течении 10...5 минут при температуре 100-250°C: чем выше температура, тем короче время сушки.

Оставшийся состав хранить в емкости с плотно закрывающейся крышкой.

Повторять покрытие после 3 - 4 плавов, тщательно размешивая состав.

Срок хранения - 2 года после выпуска.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие проверено и признано годным к использованию.

Исправления не допускаются

БРОНЯ 100.0 ТИГЕЛЬ

Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ (подпись, печать)
Дата выпуска _____	Упаковщик _____