




модель СТРУБЦИНА 1.1

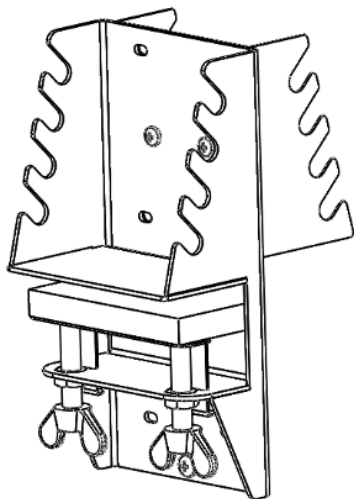

Этикетка
АВЕ 602.000.000 ЭТ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 СТРУБЦИНА 1.1 (далее – Струбцина) предназначена для крепления светильников ЛЮКС* АВЕРОН или ДЫМОПРИЕМНИК* АВЕРОН.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура10...35°С
- влажность при 25°С, не более 80%

1.3 Основные технические характеристики

- крепление к столешнице толщинойдо 40 мм
- габариты с подставкой100x125x200 мм
- масса, не более0,9 кг

1.4 Комплектность, рис.1

1 – Струбцина с винтами барашек (4)	шт	- 1
2 - Подставка для инструмента		- 1
3 - Пластина из полипропилена		- 1

Этикетка АВЕ 602.000.000 ЭТ

☒ - Светильник ЛЮКС 2.1*

☒ - поставка по дополнительной заявке

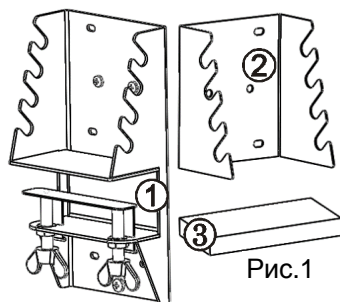


Рис.1

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1 Закрепить Струбцину (1) на столешнице. При наличии по ее краю ребра, выступающего вверх/вниз до 12 мм, подложить пластину (3) из полипропилена, из комплекта поставки.

2.2 Установить светильник ЛЮКС НЬЮЛЕД или ДЫМОПРИЕМНИК АВЕРОН согласно своей эксплуатационной документации, с использованием необходимого крепежа из его комплекта. Светильник ЛЮКС 2.1 устанавливается с использованием винтов М4х8 из его комплекта.

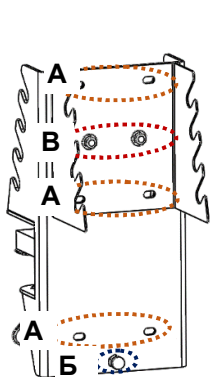


Рис.2

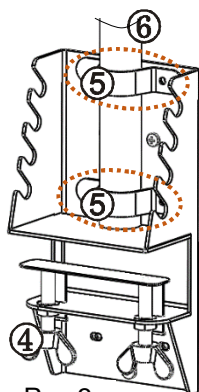


Рис.3

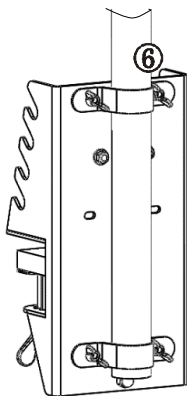


Рис.4

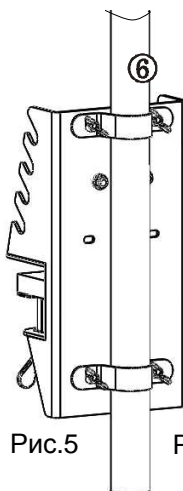


Рис.5

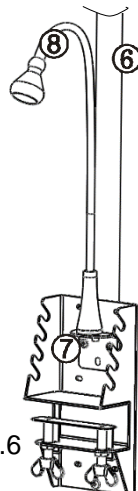


Рис.6

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей эксплуатационной документации.

Варианты крепления показаны на рисунках:

рис.2: **А** - пазы для скоб **(5)**, **Б** - Упор в виде винта с гайкой, **В** - установленный крепеж, применяется для фиксации подставки для инструмента и/или ЛЮКС 2.1

рис.3: крепление стойки **(6)** скобами **(5)** для светильников типа ЛЮКС НЬЮ с внутренней стороны струбцины;

рис.4: крепление стойки **(6)** скобами **(5)** для светильников типа ЛЮКС НЬЮ с внешней стороны струбцины. Установлен упор - винт с гайкой.

рис.5: крепление стойки **(6)** скобами **(5)** для светильников типа ЛЮКС НЬЮ с внешней стороны струбцины. Упор отсутствует, положение стойки по высоте регулируется.

рис.6: крепление кронштейна **(7)** светильника ЛЮКС 2.1 **(8)**, одновременное крепление двух светильников ЛЮКС НЬЮ и ЛЮКС 2.1 с разных сторон Струбцины.

ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

модель СТРУБЦИНА 1.1	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.