




## Инструкция по установке или замене съемных насадок НС х.0 НЬЮ на РШ 1.0 МДН/ТЮЛЬПАН АВЕ 623.090.001 И2

РШ 1.0 НЬЮ МДН - ручка электрошпателя со встроенным штыревым нагревателем для насадок НС х.0 НЬЮ с разъемом "MDN" на конце кабеля, совместима с УНИ 2.0 КОМБИ, а также может использоваться с ЭШЗ МОДИС ранних выпусков для сопряжения с насадками НС х.0 НЬЮ.

РШ 1.0 НЬЮ ТЮЛЬПАН - ручка электрошпателя со встроенным штыревым нагревателем для насадок НС х.0 НЬЮ с разъемом "тюльпан" на конце кабеля, совместима с БМ 2.0 ЭКО ПРОФИ, УСМФ 1.0 МАСТЕР, ЭШЗ 1.4/1.5 как с ранее выпущенными моделями, так и вновь выпускаемыми.



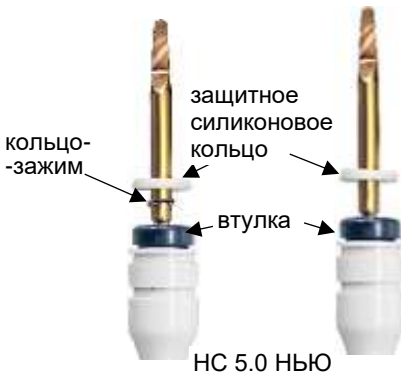

Менять насадки только в горячем состоянии.

Для смены насадки НС х.0 НЬЮ использовать пинцет с изолирующим покрытием. Съем и установку насадки производить возвратно-поступательными движениями вдоль оси моделировочного ножа, избегая вращения и покачивания.

При наличии кольца-зажима, для облегчения перемещения насадки, при необходимости, сдвинуть кольцо к рабочей части насадки.

При необходимости более плотной посадки поджать хвостовую часть насадки, сняв ее.

Не прижимать защитное силиконовое кольцо вплотную к торцу ручки во избежание перегрева ее корпуса.

При ослаблении фиксации нагревателя в ручке подтянуть втулку вращением от ручки.