

## Инструкция по установке или замене съемных насадок НС х.0 НЬЮ на РШ 1.1 МДН/ТЮЛЬПАН АВЕ 623.090.001 И2


РШ 1.1 НЬЮ МДН - ручка электрошпателя со встроенным штыревым нагревателем для насадок\* НС х.0 НЬЮ с разъемом "MDN" на конце кабеля. Может использоваться с ЭШЗ МОДИС ранних выпусков для сопряжения с насадками НС х.0 НЬЮ

РШ 1.1 НЬЮ ТЮЛЬПАН - ручка электрошпателя со встроенным штыревым нагревателем для насадок НС х.0 НЬЮ с разъемом "тюльпан" на конце кабеля, совместима с БМ 2.0 ЭКО ПРОФИ, УСМФ 1.0 МАСТЕР, ЭШЗ 1.4/1.5 как с ранее выпущенными моделями, так и вновь выпускаемыми.



---

\*- Насадка в комплект не входит

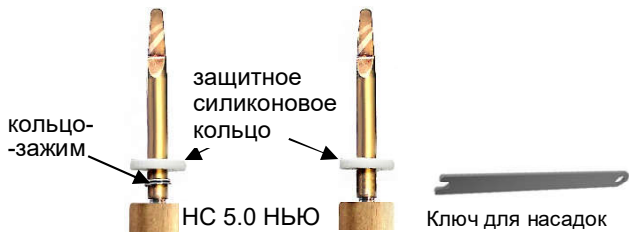

Менять насадки только в горячем состоянии.

Для смены насадки НС х.0 НЬЮ использовать ключ для снятия насадок. Съем и установку насадки производить возвратно-поступательными движениями вдоль оси моделировочного ножа, избегая вращения и покачивания.

При наличии кольца-зажима, для облегчения перемещения насадки, при необходимости, сдвинуть кольцо к рабочей части насадки.

При необходимости более плотной посадки поджать хвостовую часть насадки, сняв ее.

Не прижимать защитное силиконовое кольцо вплотную к торцу ручки во избежание перегрева ее корпуса.