



АДАПТЕР к соплам RENFERT модель КАР 1.3

Этикетка
АВЕ 263.070.000 ЭТ

Изготовитель:

620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

| модель КАР 1.3 | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Заводской номер | |
| Контролер ООО «ВЕГА-ПРО» | _____ м.п. (подпись) |
| Дата выпуска _____ | Упаковщик м.п. _____ |
| Дата продажи _____ | Продавец м.п. _____ |

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Адаптер к соплам RENFERT модель КАР 1.3 предназначен для установки струйных сопел IT (для аппаратов с тонкоструйной обработкой) фирмы RENFERT в струйные (автономные струйные) модули MC 4.3 (AMC 1.3) АВЕРОН.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25 °С, не более 80%

1.3 Комплектность

| | |
|-----------------------------|--------|
| Фитинг (1) | - 1 шт |
| Пылезащитный колпачок (2) | - 1 шт |
| Гайка (3) | - 1 шт |
| Этикетка АВЕ 263.070.000 ЭТ | |

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


До установки КАР отключить MC или AMC от источника сжатого воздуха.

3 УСТАНОВКА

КАР 1.3 устанавливается на MC/AMC с трубкой наконечника диаметром 8 мм.

Со шланга MC (AMC) снять наконечник с соплом - шланг вытянуть из наконечника и срезать с торца не менее 10 мм.

Сопло RENFERT (4) закрепить в адаптере гайкой (3), см. рисунок. Шланг (5) вставить через колпачок (2) и фитинг (1) до упирания в сопло (4).

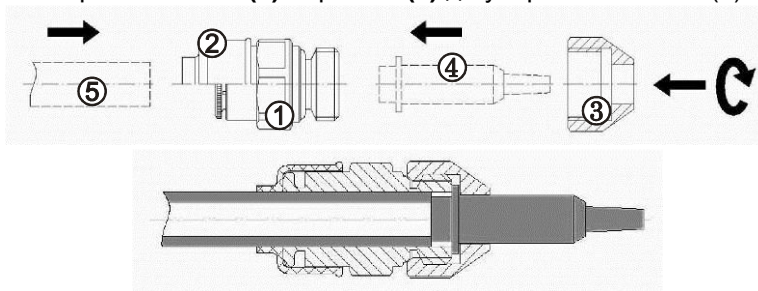

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения продуть сжатым воздухом.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.