




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ модель КОМПЛЕКТ 2.0

Этикетка
АВЕ 598.000.000 ЭТ

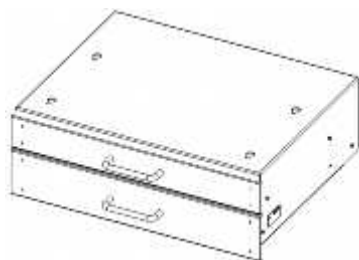

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель КОМПЛЕКТ 2.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Универсального модуля выдвижных ящиков модель КОМПЛЕКТ 2.0. ТО 5621-39-52331864-2015.

1.2 Модуль полностью металлический и предназначен для комплектования столов серии СЗТ МАСТЕР, а также для организации автономных рабочих мест.

1.3 Условия эксплуатации


- температура окружающая10...35°C
- влажность при 25°C, не более..... 80%

1.4 Основные технические характеристики

- габариты, с установленными ручками, не более 480x400x175 мм
- масса, не более..... 15 кг

1.5 Комплектность

Рама (1)	- 1 шт
Ящик верхний (2)	- 1 шт
Ящик нижний(3)	- 1 шт
Крепежный метиз	- 4 шт*
Этикетка АВЕ 598.000.000 ЭТ	

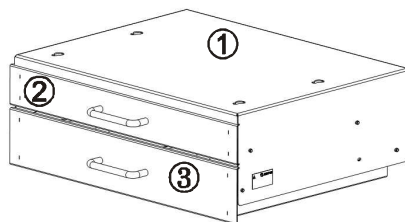

* - при поставке совместно с СЗТ МАСТЕР установлены в столешнице по месту крепления

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1 Подготовка

Распаковать, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.

2.2 Установка

- вынуть верхний ящик (2);
- полностью выдвинуть нижний ящик (3) и снять его с направляющих, нажав на пластиковые рычажки в направляющих;
- закрепить раму (1) комплектуемыми саморезами снизу столешницы рабочего места (в СЗТ МАСТЕР - винты установлены по месту);
- установить ручки ящиков из транспортного положения в рабочее;
- установить ящики на место.

ВНИМАНИЕ!

Максимальная загрузка нижнего ящика – 20 кг, верхнего ящика – 5 кг.

3 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы – 5 лет.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»

www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.