



**EAC**



# СВЕТИЛЬНИК серии ЛЮКС



**Этикетка  
АВЕ 278.000.000 ЭТ**

Сертификат соответствия  
№TC RU C-RU.АЛ16.В.06987 от 29.09.2015

**Изготовитель:**

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3  
ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20  
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72  
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23  
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

<b>серии ЛЮКС</b>	<b>3.0</b>
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

17-01

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника серии ЛЮКС (далее – **ЛЮКС**), ТУ 3461-050-52331864-2015, ТН ВЭД 9405 40 990 8.

1.2 **ЛЮКС** предназначен для совместного использования с Боксом Б 6.0/6.0 БИГ\* (далее – **БОКС**), Шлифмотором ПОЛИР 6.2 МАСТЕР и освещения их рабочей зоны. Устанавливается на Б 6.0 любого года выпуска без дополнительных доработок или креплений.

1.3 Светодиодная лампа защищена от загрязнения и механических повреждений отходами, располагается вплотную к экрану, не дает бликов.

### 1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

### 1.5 Основные технические характеристики

- электропитание ~220/230В 50/60Гц 0,1А
- мощность светодиодной лампы 5 Вт
- цоколь лампы E14
- габариты, не более 150×45×45 мм
- масса, не более 0,3 кг

### 1.6 Комплектность

Светильник с лампой

Этикетка АВЕ 278.000.000 ЭТ



Рис.1

## 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Разместить **БОКС (2)** на ровной, устойчивой, горизонтальной поверхности (рис.1).

Установить **ЛЮКС (1)** магнитами на держатели экрана (**3**).

Вставить вилку сетевого шнура **ЛЮКС** в розетку ~220/230В 50/60Гц.

Включение/выключение освещения – переключателем на сетевом шнуре.

После работы выключить переключатель и отключить **ЛЮКС** от сети.

## 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для замены лампы выкрутить винты, расположенные в торце **ЛЮКС** и фиксирующие скобу с патроном к корпусу. Новую лампу вкрутить в патрон, завести лампой под фланец с магнитом и прикрутить скобу винтами к корпусу.

## 4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы – не менее 5 лет.

Гарантия не распространяется на лампы.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

---

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

\*- эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.