



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВЫХ РОЗЕТОК модель ПСР 2.1



Этикетка
АВЕ 655.000.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ПСР 2.1	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Переключатель сетевых розеток ПСР 2.1 (далее - **ПСР**) предназначен для управления внешней вытяжкой от двух устройств, к которым она подключена. В качестве внешней вытяжки рекомендуется Устройство пылесасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон». Управляющим может быть любое устройство с розеткой для синхронного включения вытяжки, в т.ч. производства АВЕРОН: БМ ЭКО, БРМ, ПОЛИР МАСТЕР, УЗР КАСТ, ФРМ или АСОЗ с ПЭК 1.х. Для управления воздушными потоками подключать внешнюю вытяжку к устройствам с использованием переключателя воздушных каналов (ПВК) или разветвителя воздушных каналов (РВК).

1.2 Основные характеристики

- электропитание ~220/230В 50/60Гц 5А
- максимальная нагрузка 600 Вт
- габариты блока 110×110×55 мм
- масса 0,6 кг

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Переключатель ПСР 2.1 1 шт
Этикетка АВЕ 655.000.000 ЭТ 1 шт

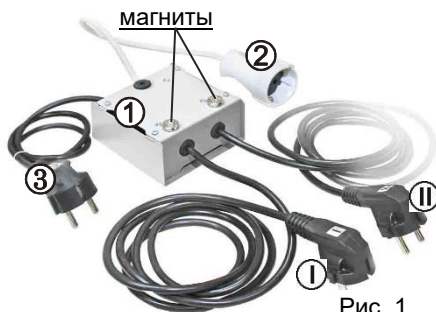


Рис. 1

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, рис. 1:

- подключить вилки (I) и (II) ПСР к розеткам управляющих устройств;
- установить максимальную мощность всасывания устройств;
- к розетке (2) подключить вытяжку;
- вилку (3) подключить к сети ~220В 50Гц.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отключить ПСР от электросети. Очистку ПСР производить отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания жидкости внутрь ПСР. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ПСР не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ПСР не требуется.

6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

<https://stomshop.pro>