



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВЫХ РОЗЕТОК модель ПСР 2.0 М



Этикетка
АВЕ 516.000.000 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ПСР 2.0 М	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Переключатель сетевых розеток ПСР 2.0 М (далее - ПСР) предназначен для управления внешней вытяжкой от двух устройств, к которым она подключена. В качестве внешней вытяжки рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон»*. Управляющим может быть любое устройство с розеткой для синхронного включения вытяжки, в т.ч. производства АВЕРОН: БМ ЭКО, БРМ, ПОЛИР МАСТЕР, УЗР КАСТ, ФРМ или АСОЗ с ПЭК 1.х. Для управления воздушными потоками рекомендуется подключать внешнюю вытяжку с использованием переключателя воздушных каналов (ПВК) или разветвителя воздушных каналов (РВК).

1.2 Основные характеристики

- электропитание ~220/230В 50/60Гц 10А
- габариты блока (ШхВхГ) 108х52х108 мм
- масса 0,57 кг

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Переключатель ПСР 2.0 М 1 шт
Этикетка АВЕ 516.000.000 ЭТ 1 шт

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ, рис. 1

Подключить вилки (I) и (II) ПСР к розеткам управляющих устройств. Установить максимальную мощность всасывания на управляющих устройствах. К розетке (2) подключить вытяжку. Вилку (3) подключить к сети ~220В 50Гц.



Рис. 1

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отключить ПСР от розетки электросети. Очистку корпуса производить отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания жидкости внутрь ПСР. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

* - эксплуатация, обслуживание и гарантии – согласно своей сопроводительной документации.