




# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ модель ПВК 1.0

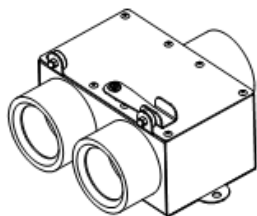

Этикетка  
АВЕ 180.000.000 ЭТ

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

| модель ПВК 1.0              |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Заводской номер             |                         |
| Контролер<br>ООО «ВЕГА-ПРО» | _____<br>м.п. (подпись) |
| Дата<br>выпуска _____       | Упаковщик<br>м.п. _____ |
| Дата<br>продажи _____       | Продавец<br>м.п. _____  |

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 Переключатель воздушных каналов ПВК 1.0** (далее - **ПВК**) предназначен для подключения двух исполнительных устройств к одной вытяжке (далее – **УПЗ**). Может использоваться с Устройством пылевсасывающим зуботехническим УПЗ-Бокс-01 «Аверон»\*, также с вытяжками других производителей. Подключение производится гофрированным шлангом, наружный D=45 мм, типа ШГВ 1.м АВЕРОН.

### 1.2 Основные характеристики

число входов/выходов .... 2/1

габариты ..... 155x140x85 мм

масса, не более..... 0,6 кг

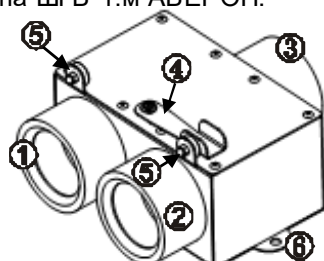


Рис. 1

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Переключатель ПВК 1.0..... 1 шт

Этикетка АВЕ 180.000.000 ЭТ.... 1

☒ - МАГНИТ 1.0 ДИСК к-т магнитов - поставка по дополнительной заявке

☒ - ШГВ 1.м гофрированный шланг - поставка по дополнительной заявке

## 3 УСТРОЙСТВО, РАБОТА (рис. 1,2)

**1,2** – входы для подключения исполнительных устройств (бокс-пылесборник, пылеуловитель и пр.)

**3** – выход для подключения **УПЗ**

**4** – ручка переключения каналов

**5** – магниты

Подключить входы (**1**) и (**2**) к исполнительным устройствам, выход (**3**) к **УПЗ**, вставив до упора шланги во втулки **ПВК**.

Рекомендуется располагать **ПВК** вверх входами (**1,2**), рис.2 -

отходы внутри не скапливаются. **ПВК** крепится к металлической (ферромагнитной) поверхности на **МАГНИТ 1.0 ДИСК** (поставка по дополнительной заявке). «Ушки» (**6**) с отверстиями - для возможности крепления к стене.

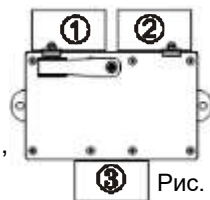


Рис. 2

Поворотом ручки (**4**) выбирается требуемое подсоединение устройств к **УПЗ**: одно из двух или оба одновременно. Положение ручки указывает, какой из входов закрыт. Магниты (**5**) надежно удерживают ручку (**4**) в крайнем положении.

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса **ПВК** производить отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания жидкости внутрь **ПВК**. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

## 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

\* - эксплуатация, обслуживание и гарантии - согласно своей сопроводительной документации.