



# РАЗВЕТВИТЕЛЬ ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ модель РВК 3.0



Этикетка  
АВЕ 363.000.000.1 ЭТ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель РВК 3.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 Разветвитель воздушных каналов РВК 3.0** (далее - **РВК**) предназначен для разводки вытяжных воздушных каналов в лабораториях. Может использоваться с пылевсасывающим устройством ПВУ АВЕРОН\*, также с вытяжками других производителей. Предусмотрено использование с гофрированным шлангом (наружный D=42...44 мм), типа ШГВ 1.x АВЕРОН.

### 1.2 Основные характеристики

Число каналов	4
Внутренний диаметр канала	41 мм
Габариты (ШхВхГ)	136×72×136 мм
Масса	0,36 кг



Рис. 1

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ, рис.1

Разветвитель РВК 3.0	- 1 шт
Заглушка	- 1 шт
Этикетка АВЕ 363.000.000.1 ЭТ	- 1 шт

☒ - МАГНИТ 1.0 ДИСК к-т магнитов (поставка по дополнительной заявке)

## 3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**РВК** устанавливается в качестве тройника (рис.1,2) в местах **постоянного** соединения трех воздушных каналов с одним, в отличие от переключателя воздушных каналов ПВК АВЕРОН, обеспечивающего коммутацию каналов. Все четыре канала равнозначны. Возможность крепления к металлической (ферромагнитной) поверхности при помощи МАГНИТ 1.0 ДИСК (поставка по дополнительной заявке).

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса **РВК** производить продувкой сжатым воздухом и отжатым тампоном, смоченным в слабом мыльном растворе. Не допускать попадания жидкости внутрь **РВК**. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

## 5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы – 5 лет.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

### Изготовитель:

**620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»**

тел. (343) 234-65-86, факс (343) 234-65-72

сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

\* - эксплуатация, обслуживание и гарантии - согласно его сопроводительной документации.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.