



**ЕАС**



# СТУЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА СТУЛ 2.0 ФОЛК



Этикетка  
**АВЕ 661.000.000 ЭТ**

Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ56.В.06187/20 от 05.10.2020

**ПРАЙС АВЕРОН** всегда под рукой на мобильном



Приложение ПРАЙС АВЕРОН для Android  
на



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricexm1>



Приложение ПРАЙС АВЕРОН для IOS  
(iPhone и iPad) на

<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>



## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Стула зубного техника **СТУЛ 2.0 ФОЛК** (далее – стул). ГОСТ 19917-2014.

1.2 Стул предназначен для укомплектования автономного рабочего места зубного техника.

### 1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10...35°С
- влажность при 25°С, не более ..... 80%

### 1.4 Основные технические характеристики

- габариты, не более ..... 630×630×890 мм
- габариты сиденья ..... 455x420 мм
- высота сиденья над уровнем пола ..... 490-600 мм
- максимальная нагрузка ..... 110 кг
- масса, не более ..... 9,5 кг

### 1.5 Особенности

- компактный, мобильный – легко перемещается на колесах;
- боковые стенки с пазами (межцентровое 60 мм) для держателей/подставок АВЕРОН под сиденьем.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ШТ

1 – сиденье с кронштейнами..... - 1

2 – каркас вращающийся ..... - 1

Этикетка АВЕ 661.000.000 ЭТ

- ДЕРЖАТЕЛЬ/ПОДСТАВКА с шагом между пазами 60 мм

- ВТУЛКА 6.0 для увеличения высоты сиденья

- Органайзер для документов ОРГАНИЗЕР 1.0 ФОЛК

- Съёмный карман КАРМАН 1.0 ФОЛК

– поставка по дополнительной заявке





Изготовитель в праве вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.


### 3 ПОРЯДОК СБОРКИ

Во избежание перекосов стул собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.


- ❶ Собрать каркас: вставить ножки в основание и зафиксировать винтами. Прикрепить колесные опоры.

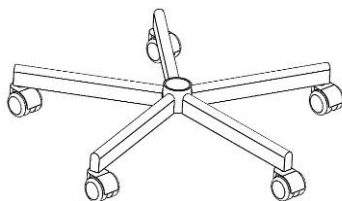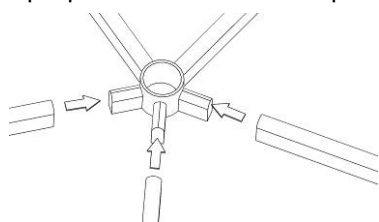

- ❷ Прикрепить пневмолифт, установив его основание в отверстие крестовины

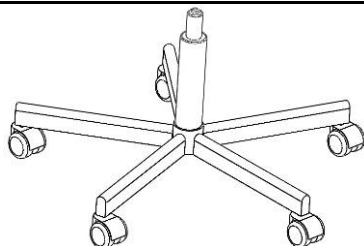

- ❸ УСТАНОВИТЬ  
- опорную площадку снизу сиденья, затем крестовину с пневмолифтом.

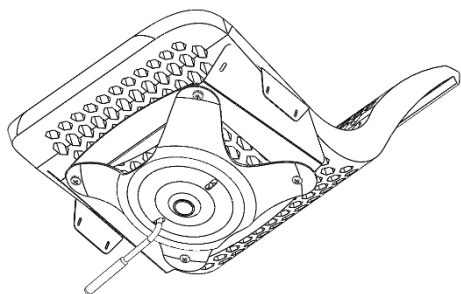

### 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Высота сиденья регулируется с помощью ручки под сиденьем.

При необходимости, убрать из рабочей зоны и разместить в подставках (поставка по дополнительной заявке) не используемые в текущей работе инструменты, материалы и др.

## 5 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе стула не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) стула не требуется.

## 6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

**Изготовитель:**

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3**

**ООО «ВЕГА-ПРО»**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20**







**тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72**

**Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

**бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02**

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

КОНТАКТЫ АВЕРОН	
 averon.ru	 Averaon Russia
 8 800 700-12-20 бесплатный по РФ	 АВЕРОН - оборудование для зубных техников
 <a href="mailto:feedback@averon.ru">feedback@averon.ru</a>	 <a href="https://www.instagram.com/averon.ru">instagram.com/ averon.ru</a>

**Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!**

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

СТУЛ 2.0 ФОЛК	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

<https://stomshop.pro>