



**ЕАС**



# СТУЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА СТУЛ 2.0 ФОЛК НЬЮ

Этикетка  
**АВЕ 661.000.001 ЭТ**



Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-РУ.АЖ56.В.06187/20  
от 05.10.2020

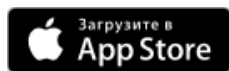
**ПРАЙС АВЕРОН** всегда под рукой на мобильном



Приложение ПРАЙС АВЕРОН для Android  
на



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricxm1>



Приложение ПРАЙС АВЕРОН для IOS  
(iPhone и iPad) на



<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Стула зубного техника **СТУЛ 2.0 ФОЛК НЬЮ** серия ФОЛК (далее – стул). ГОСТ 19917-2014.

1.2 Стул с эргономичным сидением предназначен для укомплектования автономного рабочего места зубного техника. Возможность дооснащения элементами системы хранения.

### 1.3 Особенности

боковые кронштейны с пазами (шаг 60 мм) для навешивания принадлежностей АВЕРОН: держатели/подставки, съемный карман КАРМАН 1.0 ФОЛК;

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура..... 10...35°C
- влажность при 25°C, не более ..... 80%

### 2.2 Основные технические характеристики

- габариты, не более ..... 465×470×820...930 мм
- высота сиденья над уровнем пола..... 450х560 мм
- максимальная нагрузка ..... 110 кг

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

шт

1 — сиденье с кронштейнами..... - 1

2 — каркас, в составе: крестовина с колесиками, газ-лифт, основание для сиденья с ручкой регулировки высоты. - 1

Этикетка АВЕ 661.000.001 ЭТ

☒ Поставка по дополнительной заявке:

ДЕРЖАТЕЛЬ/ПОДСТАВКА

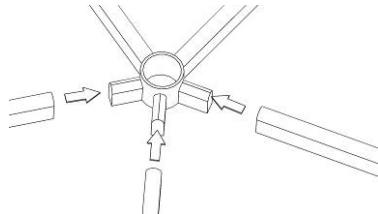
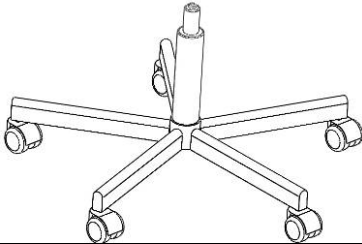
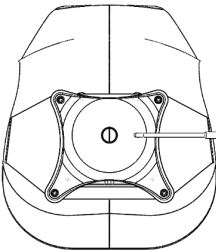


ДЕРЖАТЕЛЬ 2.0 СТАКАН

ВТУЛКА 6.0 - для увеличения высоты сиденья

КАРМАН 1.0 ФОЛК - съемный карман

### 3 ПОРЯДОК СБОРКИ

Во избежание перекосов стул собирать на ровной поверхности в вертикальном положении.

I	Собрать каркас: вставить ножки в основание и зафиксировать винтами. Прикрепить колесные опоры.				
II	Прикрепить пневмолифт, установив его основание в отверстие крестовины.				
III	Установить сиденье с опорной площадкой и кронштейнами снизу на крестовину с пневмолифтом.				

сиденье и кронштейны условно не показаны

### 4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Высота сиденья регулируется с помощью ручки под сиденьем. При необходимости, убрать из рабочей зоны и разместить в держателях и подставках (поставка по дополнительной заявке) не используемые в текущей работе инструменты, материалы и др.

### 5 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе стула не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) стула не требуется.

## 6 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

### Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

[www.averon.ru](http://www.averon.ru)

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ







Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

СТУЛ 2.0 ФОЛК НЬУ	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## КОНТАКТЫ АВЕРОН

	<a href="http://averon.ru">averon.ru</a>		Averon Russia
	8 800 700-12-20 бесплатный по РФ		АВЕРОН - оборудование для зубных техников
	<a href="mailto:feedback@averon.ru">feedback@averon.ru</a>		<a href="https://www.instagram.com/averon.ru">instagram.com/ averon.ru</a>

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!

<https://stomshop.pro>