



**ЕАЭС**



## **ТУМБА ПОДКАТНАЯ ТУМБА 1.2**



Декларация о соответствии  
ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.25587/20  
от 29.04.2020

**Этикетка  
АВЕ 664.000.000 ЭТ**


**ПРАЙС АВЕРОН всегда под рукой на мобильном**



Приложение ПРАЙС АВЕРОН  
для Android на



<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.averon.averonpricexml>

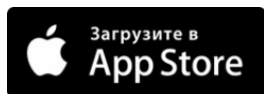

Приложение ПРАЙС АВЕРОН  
для IOS (iPhone и iPad) на



<https://apps.apple.com/ru/app/прайс-аверон/id1484614177>

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Тумбы подкатной ТУМБА 1.2 (далее – тумба). ТО 31.09.11-039-52331864-2020.

### 1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура ..... 10-35 °С
- влажность при 25°С, не более ..... 80 %

### 1.3 Основные технические характеристики

- габариты ..... 405×490×620 мм
- размер столешницы ..... 400×450 мм
- масса, не более ..... 20 кг
- максимальная нагрузка на столешницу ..... 60 кг

### 1.4 Особенности

Оптимальна для размещения электровакуумной печи ЭВП АВЕРОН.

Со столом СЗТ АВЕРОН образует законченное рабочее место зубного техника.

Может размещаться под столешницей с установленным модулем выдвижных ящиков КОМПЛЕКТ 2.1.

Полностью металлическое исполнение.

Ящики с шариковыми направляющими полного выдвижения.

Нижний ящик – большей вместимости, верхний – с замком. В ящиках размещены износостойкие коврики.

Возможность установки полезных элементов (справа и слева пазы (5) с шагом 140 мм).


## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	шт
Тумба в сборе (1)	
Ящик с замком (2)	– 1
Ящик малый (3)	– 1
Ящик большой (4)	– 1
Коврик для ящика	– 3
Крепеж установлен по месту	
Этикетка АВЕ 664.000.000 ЭТ	

Возможность установки:

- (6) КРЮЧОК 3.0 (☒)
- (7) ПАНЕЛЬ 1.1 БРИДЖ ПЛЮС (☒)
- (8) НАДСТРОЙКА 1.0 ТУМБА (☒)
- АФЦ 1.0 НЬУ (☒)
- ДЕРЖАТЕЛЬ-РАМКА 1.0 ТРЭШ (☒)

☒ - поставка по дополнительной заявке

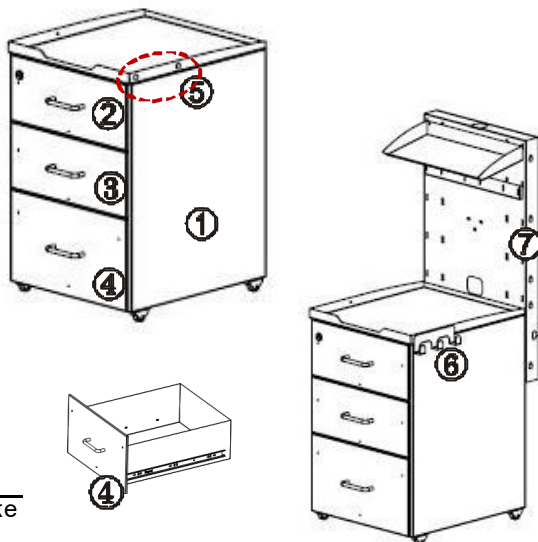

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.



### 3 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется для облегчения и ускорения подготовки использовать электроинструмент (шуруповерт, электроотвертка).

Убрать транспортировочные вкладыши ►.

Установить ручки ящиков из транспортного положения в рабочее.

Столешницу выровнять горизонтально вращением опор.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Максимальная загрузка ящиков – 15 кг.

При движении ящиков по шариковым направляющим может потребоваться дополнительное усилие в начале и конце хода.

#### **ГАРАНТИИ**

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

#### **Изготовитель:**

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» [www.averon.ru](http://www.averon.ru)

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

[feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

<https://stomshop.pro>

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ







Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

<b>ТУМБА 1.2</b>	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	Упаковщик
Дата продажи _____	Продавец

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

### КОНТАКТЫ АВЕРОН

	averon.ru		Averon Russia
	8 800 700-12-20 бесплатный по РФ		АВЕРОН - оборудование для зубных техников
	feedback@averon.ru		instagram.com/ averon.ru

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях!