




EAC



МОДУЛЬ ВЫТЯЖНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ серии ВМУ

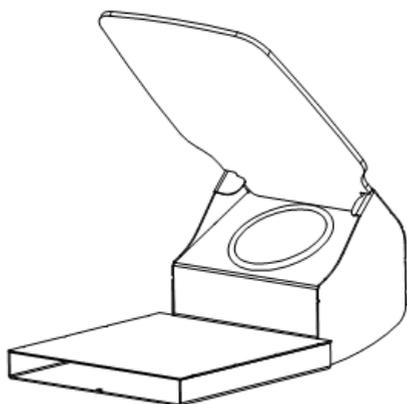

**Этикетка
АВЕ 642.000.000 ЭТ**

Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.AY04.B.21671 от 16.07.2015

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ распространяется на Модуль вытяжной универсальный серии ВМУ, (далее – ВМУ). ТУ 4863-047-52331864-2015.

1.2 ВМУ предназначен для комплектования столов СЗТ 4.3 МАСТЕР/МИНИ (далее – СЗТ), при организации автономных рабочих мест по механической обработке изделий и при проведении других аналогичных работ.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура..... 10...35°С
- влажность при 25°С, не более80%

1.4 Основные технические характеристики

- диаметр подсоединяемого шланга 45 мм
- масса, не более 1,0 кг
- габариты, без экрана, не более 150×245×115 мм

1.5 Особенности

- Подключается к внешней вытяжке для удаления сухих мелко/среднедисперсных отходов. Рекомендуется Устройство пылевсасывающее зуботехническое УПЗ-Бокс-01 «Аверон»,* далее - УПЗ.
- Быстросъемный экран предохраняет лицо и глаза пользователя от возможного попадания в них пыли и крупных частиц, в том числе при разрушении инструмента.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

	шт
1 – Корпус	- 1
2 – Экран защитный ЩИТ 1.0 АРТ	- 1
3 – Съёмный фильтр-сито	- 1
Втулка резиновая ВТУЛКА 1.0 ШГВ	- 1
Этикетка АВЕ 642.000.000 ЭТ	

- Поставка по дополнительной заявке
Экран защитный ЩИТ 1.0 АРТ



Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

*- эксплуатация, обслуживание и гарантии согласно своей сопроводительной документации.


3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установить ВМУ в СЗТ вместо финагеля.

Установить экран (2) в паз на корпусе ВМУ, предварительно сняв с него защитную пленку.

Установить в отверстие вытяжного канала СЗТ резиновую втулку.

Подсоединить входной шланг УПЗ к втулке.

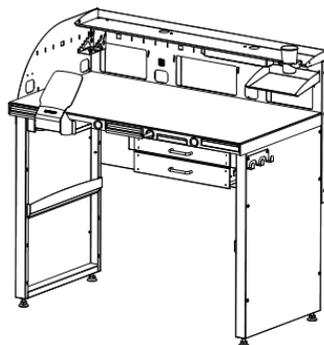

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере необходимости:

- очистка воздушных каналов ВМУ от производственных отходов с использованием УПЗ;
- протирка внутренних, наружных поверхностей и экрана от пыли влажной мягкой тканью (губкой).

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на экран.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Адрес Изготовителя:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3

ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

www.averon.ru

feedback@averon.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ВМУ	2.0 АРТ
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.