



# ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОЗДУШНОГО КАНАЛА модель ВВК 1.0

Этикетка  
АВЕ 390.000.000 ЭТ



## ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

### Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» [www.averon.ru](http://www.averon.ru)

бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20

тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72 [feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель ВВК 1.0	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____


Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

**1.1 Выключатель воздушного канала ВВК 1.0** (далее - **ВВК**) предназначен для перекрытия вытяжной магистрали между рабочим местом и вытяжкой. Может использоваться с Устройством пылевсасывающим зуботехническим УПЗ-Бокс-01 «Аверон»\*, также с вытяжками других производителей. Предусмотрено использование с гофрированным шлангом (наружный D=42...44 мм), типа ШГВ 1.х АВЕРОН.

### 1.2 Основные характеристики

Число входов/выходов..... 1/1  
Габариты (ШхВхГ)..... 80х85х150 мм  
Внутренний диаметр входа/выхода..... 41 мм  
Масса ..... 0,43 кг

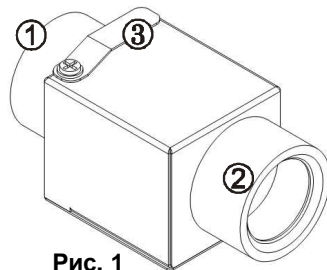

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Выключатель ВВК 1.0 1 шт

Этикетка АВЕ 390.000.000 ЭТ 1 шт

☒ - МАГНИТ 1.0 ДИСК к-т магнитов (поставка по дополнительной заявке)

## 3 УСТРОЙСТВО, РАБОТА (рис. 1)

1 – выход для соединения с входом вытяжки

2 – вход для подсоединения выхода исполнительного устройства (боксы-пылесборник, пылеуловитель и пр.)

3 – ручка управления заслонкой

Для работы включить **ВВК** между вытяжкой и исполнительным устройством, соединив соответствующие шланги с входом (2) и выходом (1) (до упора). Возможна установка **ВВК** последовательно с переключателем ПВК АВЕРОН или разветвителем РВК АВЕРОН. Возможно крепление к металлической (ферромагнитной) поверхности при помощи МАГНИТ 1.0 ДИСК (поставка по дополнительной заявке).

Для исключения затруднения в открывании/закрывании заслонки из-за накопления отходов в корпусе **ВВК** рекомендуется располагать его входом (2) вертикально вниз. Поворотом ручки (3) заслонка перекрывает или открывает выход (1).



## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса **ВВК** производить продувкой сжатым воздухом и отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания жидкости внутрь **ВВК**. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия/

\* - эксплуатация, обслуживание и гарантии - согласно его сопроводительной документации.