



БЛОК АВТОНОМНОЙ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ модель БВ 3.2 М



Этикетка
АВЕ 246.000.002 ЭТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

модель БВ 3.2 М	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____ м.п. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Блок автономной вытяжной вентиляции БВ 3.2 М (далее БВ) предназначен для удаления из нагревательной камеры Печи электрической сушильной ЭПС “АВЕРОН”, Электропечи муфельной ЭМП “АВЕРОН” (ЭМП 11.0 М, ЭМП 11.6) побочных продуктов термического процесса (пары воды, аммиака, продукты сгорания воска и пр.), препятствующих качественному изготовлению опок для литья.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более 80 %

1.3 Основные технические характеристики

- электропитание ~220В 50Гц 0,2А
- габариты (ШхВхГ), не более 130×320×155 мм
- масса изделия, не более 2,0 кг

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

труба эжекторная с вентилятором	– 1 шт
трубка Ø20×18 мм	– 2 шт
саморез 3,5×9,5	– 4 шт
этикетка АВЕ 246.000.002 ЭТ	



3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Принцип действия **БВ** основан на эффекте эжекции.

Сформированный **БВ** поток воздуха проходит через основной канал эжекторной трубы и создает разрежение, обеспечивающее отток воздуха из камеры **ЭПС/ЭМП** через отверстие для вытяжки.

Управление **БВ** осуществляется от блока управления **ЭПС/ЭМП**.

Силиконовая трубка используется для герметизации стыка вытяжных патрубков **ЭПС/ЭМП** и **БВ**. Способ подсоединения **БВ** к **ЭПС/ЭМП** описан в соответствующем Руководстве по эксплуатации

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По мере загрязнения проводить очистку наружных поверхностей **БВ** от пыли влажной мягкой тканью, губкой.

5 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы – 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:

620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»

бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20

тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72

сервис-центр: тел. (343) 234-66-23