

USB камера торговой марки DEVISA, модель PX-130

Производства Monitex Industrial Co., Ltd, Тайвань, КНР

Комплект поставки:

- USB камера торговой марки DEVISA, модель PX-130 - 1 шт.
- Кабель USB (2,5 м) - 1 шт.
- CD диск с драйвером для подключения к ПК - 1 шт.
- Одноразовые защитные чехлы - 50 шт. (1 упаковка)

Технические характеристики

Сенсор	1/4" CCD
Максимальное разрешение	1280 x 960 пикселей
Видеовыход	цифровой
Диапазон фокусировки	от 4 ~ 35 мм
Угол обзора	68°
Источник света	6 белых светодиодов
Размеры камеры	20x25x205 мм
Вес камеры	57 г
Электропитание	порт USB2.0; 5 В постоянный ток
Кабель USB	2,5 м (в комплекте)



Меры безопасности

1. Камера не подлежит автоклавированию. Очищайте камеру мягкими моющими или дезинфицирующими средствами.
2. Не касайтесь разъема камеры материалами, проводящими ток (такими, например, как металл) или влажными предметами во избежание короткого замыкания и возможного повреждения камеры.
3. Не разбирайте камеру, это может привести к ее поломке.
4. Не сжимайте камеру и/или кабель во избежание их повреждения.
5. Отключайте кабель от USB-порта, если Вы не планируете использовать камеру продолжительное время.

Требования к окружающей среде

1. Камера должна эксплуатироваться в сухом помещении. Предохраняйте камеру от прямых солнечных лучей. Не подключайте камеру во влажном и/или пыльном помещении или при несоответствующей температуре.
2. Рабочие условия: температура окружающей среды от -20 °С до +50 °С, относительная влажность 30% ~ 90%.
3. Условия транспортирования: температура окружающей среды от -20 °С до +60 °С, относительная влажность 10% ~ 90%.