

# MD 530

## Удалитель цемента и очиститель протезов



MD 530, специальное очищающее средство для удаления кислоторастворимых отложений, например, цемента, может использоваться также в качестве универсального средства для ухода за протезами. Средство MD 530 особенно отличается интенсивным очищающим действием и весьма хорошими свойствами, замедляющими коррозию. MD 530 без проблем производит очистку протезов, мостов, коронок, шпателей, стекла и т.п., а также удаляет цемент, зубной камень, слои окислов, никотиновые пятна и т.п. Кроме того, можно удалять следы коррозии и остатки жидкостных средств.

Состав: средство MD 530 содержит неорганические кислоты (5 - 15 %), поверхностно-активные вещества (< 1 %), вспомогательные компоненты.

Применение: средство MD 530 используется в нерастворенном виде при комнатной температуре. Подлежащие очистке предметы положить в MD 530 и оставить их в растворе максимум до 10 минут. При использовании ультразвукового прибора раствор наливать не непосредственно в ванну, а в отдельную рабочую емкость. Для инструментов из высококачественной стали мы рекомендуем продолжительность ультразвукового воздействия от 2 до максимум 4 минут, для всех других предметов из стекла, фарфора или искусственных материалов - до 10 минут. После обработки очищенные предметы основательно промыть водой и высушить. Раствор обновлять по необходимости.

Указания: средство MD 530 применять только для инструментов и предметов из стойких к воздействию кислот высококачественных сталей, стекла, фарфора или искусственных материалов. Инструменты общего назначения и вращающиеся инструменты, за исключением шпателей и штопферов, в средство MD 530 не класть. Средство MD 530 не предназначено для легких и цветных металлов, а также для незащищенной стали (например, для сверл, фрез, инструментов для обработки корневых каналов).

Внимание. Вызывает сильное раздражение глаз. Носить защитные перчатки и защитные очки/маску. Если раздражение глаза не проходит: проконсультироваться с врачом/обратиться за помощью к врачу. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте.

Dürr Dental AG  
Höpfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Germany  
www.duerrdental.com  
info@duerr.de

2016-12



<https://stomshop.pro>