



Space-Pack & Space-Fill

МОЩЬ В МИНИАТЮРЕ





Технология соединения на магните

Обеспечивает мгновенный нагрев. Инновационная магнитная конструкция позволяет быстро заменить батарею.





Сменный аккумулятор

Space-Pack: до 800 манипуляций на корневые каналы за 1 заряд.
Space-Fill: до 80 манипуляций с корневыми каналами за 1 заряд.

Лёгкий корпус для тонких операций

- Вес термоплаггера – 84 г, вес инжектора – 129 г.
- Рука не устаёт даже при длительных процедурах.

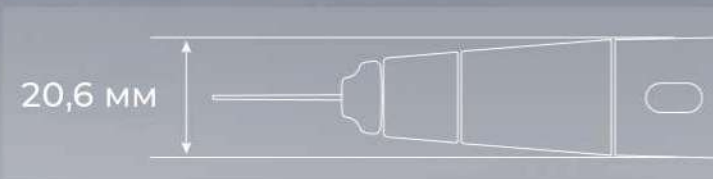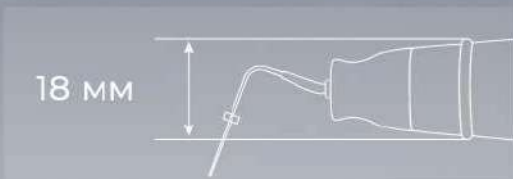

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НАКОНЕЧНИКОВ

Плаггеры

В комплекте,
можно
приобрести
отдельно


Ø 0.4 мм



Ø 0.5 мм



Ø 0.6 мм

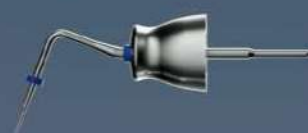


Иглы

В комплекте,
можно
приобрести
отдельно

23 Gа*




25 Gа*

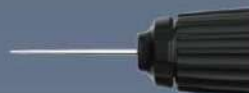

27 Gа*



* Размер Gauge

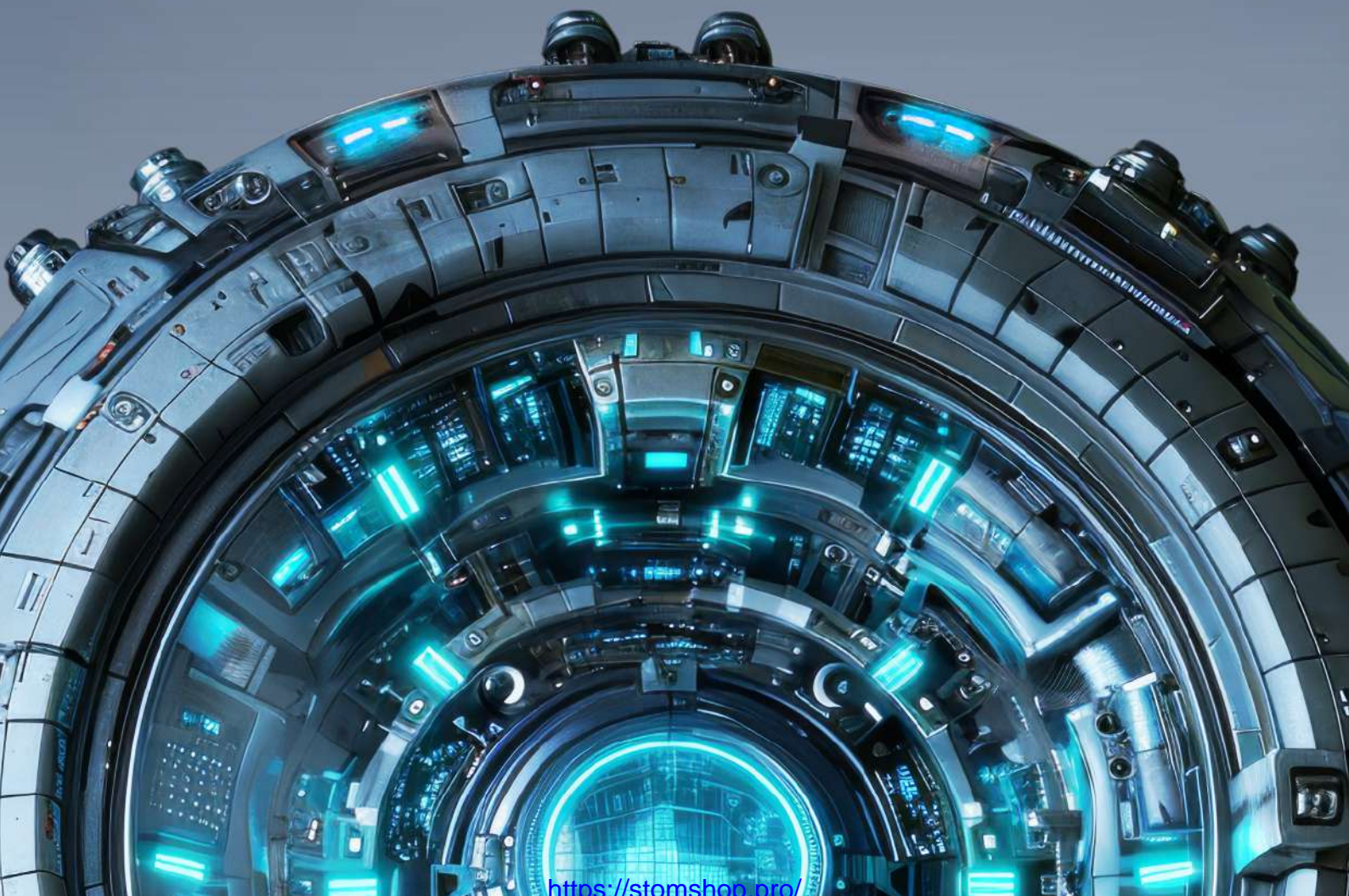

ИНЖЕКТОР Space-Fill

Гнущаяся игла из серебра 999 пробы

- Увеличенная длина для наилучшего обзора при работе
- Надёжное соединение предотвращает протечку
- Иглу можно автоклавируют

Электропривод для нагрева гуттаперчи

- Мгновенный запуск и остановка процесса
- Материал выделяется без пузырьков для плотного наполнения канала

Пять предустановленных настроек

- Можно изменить и использовать для различных целей

Профессиональные настройки

- Температурный диапазон: 100°C - 200°C
- 3 скорости подачи: low, medium, high

Светодиодный экран

- Показывает остаток гуттаперчи





Силиконовая прокладка

Герметичная конструкция предотвращает протечку материала и облегчает процесс ухода за прибором



Стальной мультитул

Позволяет удалить остатки гуттаперчи и почистить прибор изнутри, а также плавно сгибает иглу без риска поломки

Два инновационных режима работы:

- Беспрерывная подача материала;
- Количественный режим с предварительным выбором объёма расходного материала (5 режимов).



Термоплаггер Space-Pack



Улучшенный нагрев наконечника

- Технология нагрева исключительно рабочей части прибора (4-6 мм от края наконечника)



Кнопка активации работает на 360°

- Подойдет как для правой, так и для левой руки
- Звуковой отклик на нажатие (отключаемый)



Пять ячеек параметров (T1-T5)
для быстрого изменения температуры



Отображение температуры
в реальном времени



Настраиваемое автоотключение

- Настройка до выключения от 3 до 10 секунд
- Обеспечивает удобство и безопасность



Смарт-система контроля температуры

Широкий диапазон температур от 120°C до 300°C позволяет использовать термоплаггер Space-Pack с различными видами гуттаперчи.

Алгоритм адаптивной компенсации обеспечивает плавный нагрев и стабильное поддержание температуры рабочей части. Это минимизирует риск перегрева или недостаточного нагрева прибора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термоплаггер Space-Pack

Время нагрева	0.07 секунд до 200°C (для наконечника Ø 0,35 мм)
Время охлаждения	2 секунды
Время зарядки	45 минут до полной зарядки
Время работы	до 800 манипуляций за заряд
Вес с наконечником	84 г
Длина с наконечником	180 мм

Инжектор Space-Fill

Время нагрева	10 секунд до 180°C
Время охлаждения	2 секунды
Время зарядки	45 минут до полной зарядки
Время работы	до 80 манипуляций за заряд
Вес с наконечником	129 г
Длина с наконечником	206 мм

