

Карта формовочных материалов фирмы ERKODENT

МАТЕРИАЛ	ЦВЕТ	ПРИМЕНЕНИЕ	ТОЛЩИНА ПЛАСТИНЫ, мм.	ВРЕМЯ НАГРЕВА, мин.сек	ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА
ERKOPLAST - R	Розовый	Прикусные и базисные пластинки верхней челюсти Прикусные и базисные пластинки нижней челюсти Индивидуальные слепочные ложки верхней челюсти Индивидуальные слепочные ложки нижней челюсти	1.5 2.5 3.0 4.0	1.15 1.35 1.55 2.50	Прочный материал. очень хорошо термоформируется сочетается с акрилатом
ERKOPLAST - O	матовый, Непрозрачный	Прикусные и базисные пластинки верхней челюсти Прикусные и базисные пластинки нижней челюсти Индивидуальные слепочные ложки верхней челюсти Индивидуальные слепочные ложки нижней челюсти	1.5 2.5 3.0 4.0	1.25 1.45 2.05 3.00	
ERKORIT	ясный	Прозрачные индивидуальные слепочные ложки верхней челюсти Прозрачные индивидуальные слепочные ложки нижней челюсти	2.5 3.5	1.45 2.35	Прочный материал. очень хорошо термоформируется. сочетается с акрилатом
ERKOLEN Внимание: при формовке разделителей капп добавьте 20 сек.	Естественный прозрачный матовый	Дублирование (0.5/0.6/0.7/0.8), дублирующие формы(0.5-0.8) , протравливающие маски и шины для перемещения брикетов(0.8/1.0) , разделитель кап для фторирования (0.6/0.7) временные шины (1.00/ 2.00),временные аппараты(0.8/1.0)	0.5 0.6/0.7 0.8 1.00 1.5 2.00/3.00	0.35 0.40/0.45 0.55 1.00 1.35 2.05/2.55	Мягкий эластичный материал. С акрилатом не сочетается. Выжигается без остатка.
ERKOLEN-A/-AW	естественный прозрачный матовый	Для ручного изготовления литых форм (ERKOMINI)	0.6/0.6	0.40/0.40	
UZF, UZF-A / Universal- UZF	красный, прозрачный коричневый белый	как компенсационная фольга для формовки литых форм универсальный материал UZF используется как компенсационная фольга для ERKOFLEX и ERKOLOC Внимание: не перегревать	красный 0.10 прозрачный 0.10 коричневый 0.15 белый 0.10	0.5 0.5 0.75 0.5	Тонкая фольга, хорошо термоформируется Рекомендация: прозрачный UZF для ERKODUR-C и ERKOLEN-A, красный и коричневый для ERKOLEN
ERKOFLEX ERKOFLEX Color	прозрачный или цветной	шины для перемещения брикетов(1.5/2.0), дублирующие формы(3.0/4.0/5.0) позиционеры(3.0/4.0/5.0), каппы для спорта PLAYSAFE(2.0+4.0)	1.0/1.5 2.00 3.00 4.00/5.00	0.25/0.35 0.55 1.25 2.05/2.30	Эластичный мягкий материал. Может соединится с другими пластинами нагревом или клеящим пистолетом. С акрилатом не сочетается. Предел твёрдости: A 82
ERKOFLEX 95	естественный (прозрачный) матовый или цветной	шина против бруксизма(2.0-5.0),фторирующие каппы(1.5), медикаментозная терапия(1.5),аппарат против храпа(1.5-5.0),окклюзионные шины(полужёсткие) (2.5/4.0),спортивные каппы(1-й слой)(4.0)	1.50 2.50 4.00	1.00 1.40 2.40	Очень эластичный материал. Может быть применён для корректировки нагревом или термпистолетом. С акрилатом не сочетается.
ERKOFLEX -bleach	прозрачный	отбеливающие, фторирующие,медикаментозная терапия	1.00	0.55	Хорошо термопластичный материал. Очень эластичный гибкий материал. С акрилатом не сочетается.
ERKODUR	прозрачный ясный	жесткие литые формы(0.5/0.6), аппарат против храпа(1.5-5.0),окклюзионные шины(1.5-5.0), шины против бруксизма (2.0-5.0) ортодонтические пластины(1.0/1.5/2.0), мичиганские шины(1.5-5.0) ретенеры(0.6/1.0/2.0), стабилизационная шина(твердая)(1.0/1.5)	0.50/0.60 0.8/1.00 1.50/2.00 3.00/4.00	0.35/0.40 0.45/0.50 1.05/1.25 2.05/2.40	Очень упругий жёсткий материал.Хорошо термоформируется. Выжигается без остатка. Сочетается с акрилатом.
ERKODUR - C	прозрачный ясный	(формирователь временных протезов из акрила) временные протезы(0.6-1.0) то же, что и для ERKODUR	0.50 0.6,0.8,1.00 1.50 2.00	0.45 0.50,1.00,1.10 1.25 1.45	Упругий, жёсткий материал. Хорошо термоформируется. Выжигается без остатка. Сочетается с акрилатом.
ERKODUR - S	прозрачный ясный	для конструкции каппы для спорта PLAYSAFE HEAVY-PRO	0.8	0.40	Жёсткий материал. Хорошо термоформируется. Сочетается с акрилатом, а при нагреве и с ERKOFLEX
ERKOCRYL ISO-UZF	розовый / прозрачный белый	основания зубных протезов (розовый)(2.0/2.5), промежуточные зубные ряды(2.0/2.5),ортодонтические пластины(2.0/2.5) , опорные пластины(1.5/2.0),	1.50 2.00 2.50	1.55 2.20 2.55	Стабильный, твёрдый материал на основе акрилата. Сочетается с акрилатом.
ERKOLOC - pro	прозрачный	каппы от бруксизма(2.0-5.0), мичиганские шины(2.0-5.0), вставка для аклюзионных шин, аклюзионные шины (мягкие / твёрдые)(2.0-5.0), стабилизационные шины(2.0) ,ретенеры(2.0), аппарат против храпа(2.0-5.0)	2.00 3.00 4.00 5.00	см. указания на упаковке	Двухслойная пластина (твёрдая/мягкая,толщина мягкой стороны всегда 1 мм) очень жёсткий твёрдый материал. Сочетается с акрилатом.
ERKOLOC	прозрачный	комфортабельные мини пластиковые шины(1.8) комфортабельные жесткие мягкие двухслойные шины(3.0)	1.80 3.00	1.20 2.05	Двухслойная пластина,твёрдая/мягкая. Прочно прилипает к акрилату.Выдержите 2 часа для гарантированной устойчивой связи с акрилатом. Имеет ограниченный срок службы при интенсивном использовании.