



CHEESE II

GIGAA
LASER



TOTAL DENTAL SOLUTION

New generation dental diode laser - Built on years of experience

ADD: 5, 6/F, Unit A, B, Building 88, Hi-Tech Medical Device Industrial Park,
#818 Gaixin Avenue, East Lake Development Zone, Wuhan 430206, China
Ph: 86-27-67848871 67848872 Fax: 86-27-67848873
<http://www.gigaalaser.com> Email: info@gigaalaser.com

Стоматологический лазер от компании GIGAA LASER является наиболее доступным по цене, но самым современным инструментом в стоматологии для работы с мягкой тканью. Специализированная длина волны обладает высокой поглощаемостью водой и гемоглобином, и сочетает точные режущие свойства с сопутствующей коагуляцией. Лазер с частотой 10KHz может очень точно, гладко и быстро резать мягкую ткань с меньшим количеством крови и болевого ощущения, в сравнении с обычными хирургическими инструментами. Помимо применения в хирургии мягких тканей, лазер так же используется в других направлениях стоматологии - обеззараживание, биостимуляция и отбеливание зубов.

Клиническое применение

А. ТЕРАПИЯ ПАРОДОНТА

Гингивит-2W

Пародонтит - Pulse, 5 мс, 00/500 1 -2.5W

Оперкулектомия - CW, 3 -3.5W

Френэктомия - CW, 2 -2.5W

Гингивэктомия - CW, 1.5-2W



Б. ЭНДОДОНТИЯ

Стерилизация корневых каналов - CW, 1W

Периапикальный абсцесс - CW 1.2-1.5W

Кариес - Pulse 1.2W, 5 00/500мс

Десенсибилизация - Pulse, 3 0/30мс, 3W

Лазерное обезболивание, - CW, 2W

С. ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Иссечение мягких тканей - 2W

Удаление - 2.5W

Имплантат экспозиции - CW, 2 - 3W

Периимплантит - 2W

Афты и герпес - 1.5W

Д. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Отбеливание - CW, 1.5-3W

Депигментация - CW, 2 -3.5W

Коррекция десневой улыбка - 2W

Афты и герпес, CW, 1.5-2W

Удлинение коронки зуба, CW, 1.5W

Е. БИОСТИМУЛЯЦИЯ

Десенсибилизация зубов - Pulse 3,0/30мс, 0.5-5W

После удаление зуба - 0.8W

Височно-нижнечелюстной сустава - 0.8W

Кровоостанавливающее - CW, 0.8-1.5W

Лейкоплакия - 2W



Surgery handpiece



| |
|----------------------------|
| Aluminum Alloys |
| 4 disposal tips: R14.8mm |
| Length: 166mm |
| Diameter: Φ13.8mm |
| 200µm/400µm/600µm suitable |
| Surgery |

Bleaching handpiece



| |
|------------------------------|
| Aluminum Alloys |
| Length: 140mm |
| Diameter: Φ16.6mm |
| Spot size: 40mm(L) * 10mm(w) |
| 600µm with |
| SMA905 on both sides |
| Tooth whitening |

Biostimulation handpiece



| |
|------------------------|
| Aluminum Alloys |
| Length: 164.5mm |
| Diameter: Φ16.6mm |
| Spot size: 3mm or 10mm |
| 600µm with |
| SMA905 on both sides |
| Therapy |