

## ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ НАДДЕСНЕВЫЙ ПОРОШОК ГЛИЦИН ИНСТРУКЦИЯ

### 1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Название продукта:

НАДДЕСНЕВОЙ ГЛИЦИН (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПОРОШОК)

Модель продукта: MINT 55

Полирующие порошки были разработаны исключительно для профилактической обработки наддесневой области. Полировочный порошок, содержащий глицин в качестве основного компонента, распыляется на поверхность зуба с помощью полировального устройства для удаления налета или пигмента. Эти порошки могут использоваться с полировальными устройствами. Рекомендуется использовать профилактический аппарат VRN-Q6 и усовершенствованные средства для его использования.

Упаковка полировочных порошков:

1. Многоцветная бутылка с носиком 160 г.
2. Многоцветная бутылка с носиком 220 г.

### 2. НАЗНАЧЕНИЕ

1. Удаление наддесневого налета, пятен и зубного камня.
2. Полировка зубов после удаления зубного камня.
3. Удаление пятен с альвеолярных и чувствительных участков.

### 3. СОСТАВ

Этот продукт представляет собой белый порошок, содержание глицина > 90%.

Состав: глицин, диоксид кремния, порошок пищевой мяты.

### 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

Перед использованием порошка рекомендуется оценить общее состояние здоровья пациента.

1. Пациент должен надеть защитные очки.
2. Врач должен носить соответствующие защитные аксессуары (защитные очки, маски, перчатки).
3. Используйте аспиратор вашей стоматологической установки. Это устройство помогает эффективно удалять излишки порошка и слюны из полости рта пациента, улучшая видимость и снижая риск аспирации или дисперсии порошка.
4. Пациент должен прополоскать рот антисептическим раствором до и после процедуры.
5. Перед полировкой нанесите на губы вазелин.
6. После использования протрите лицо пациента (например, влажной салфеткой).

7. Не используйте порошок в количестве, превышающем максимально допустимое для данного инструмента.

8. В случае случайного попадания на кожу или в глаза тщательно промойте их водой.

9. Не глотайте.

10. Порошок, срок годности которого истек, в соответствии с местными правилами утилизации и уничтожения, нельзя выбрасывать в канализацию или реки, а также смешивать с выбрасываемым бытовым мусором.

11. За исключением противопоказаний, этот продукт подходит для взрослых и детей, нуждающихся в стоматологическом лечении.

12. Изделие одноразовое и не подлежит повторному использованию.

## **5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

1. Пациентам, страдающим инфекциями верхних дыхательных путей, хроническим бронхитом или астмой, ни при каких обстоятельствах не должны проходить лечение с использованием устройства для воздушной полировки. Струя воздуха и порошка может вызвать затруднение дыхания.

2. Предрасположенные лица могут быть чувствительны к хлоргексидину. При появлении аллергических реакций прекратите использование продукта и полностью удалите порошок изо рта.

3. Обработка глубоких пародонтальных карманов может вызвать бактериемию. Пожалуйста, применяйте соответствующие ограничения при лечении пациентов из группы риска (эндокардит, беременность, кормление грудью, инфекционные заболевания), с иммунодефицитом (нейтропения, ангранулоцитоз, сахарный диабет, гемофилия), пациентов, находящихся на лечении (лучевая терапия, химиотерапия, антибиотики).

4. Не направляйте струю порошка на пломбы, коронки или мостовидные протезы, так как это может повредить их.

5. Пациентам, страдающим тяжелыми заболеваниями пародонта, рекомендуется устранить воспаление перед полировкой.

## **6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Следуйте инструкциям по использованию, прилагаемым к вашему полировочному устройству.

1. Поддерживайте угол между струей и поверхностью в пределах от 45° до 60°.

2. Поддерживайте расстояние между струей и поверхностью около 5 мм.

3. Делайте небольшие круговые движения по зубу.

4. Не задерживайтесь долго на одном месте.

5. Направляйте струю к жевательному краю.

## **7. ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ**

1. Порошок не должен храниться рядом с кислотами или источниками тепла.

2. Условия транспортировки: температура не должна превышать 40°C, относительная влажность должна быть в пределах от 10% до 95%.

3. При хранении в комнатной температуре, в прохладном, вентилируемом, сухом, непыльном и герметично закрытом месте, порошок имеет срок годности 2 года.

4. Порошок не должен долго подвергаться воздействию воздуха. Пожалуйста, используйте его в течение 3 месяцев после вскрытия бутылки. Порошок не должен храниться в камере для порошка более одной недели.

## 8. УТИЛИЗАЦИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ПОРОШКА

1. Не выбрасывайте в канализацию или реки.
2. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами.
3. Порошок с истекшим сроком годности следует утилизировать в соответствии с местными правилами.

## 9. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ НА ЭТИКЕТКЕ

	Максимальная температура		Производитель		Ознакомьтесь с инструкцией по применению
	Хрупкий		Номер партии		Дата изготовления
	Срок годности		Хранить в сухом месте		Вверх
	Ограничение влажности		Перед использованием хорошо взболтать		Лимит стека

 Производитель:

URIT Medical Electronic Co., Ltd.

Адрес: Восточная аллея №4, Цзюхуа-роуд, Гуйлинь, Гуанси 541001, КНР  
Эксклюзивный дистрибьютор и послепродажное обслуживание:

Guilin Veirun Medical Technology Co., Ltd.

Адрес: №D-07, Район информационной индустрии, Зона высоких технологий, Гуйлинь, Гуанси 541004, КНР.

Телефон: +86-773-2260599 2260566 Веб-сайт: [www.veirun.com](http://www.veirun.com) Версия 1.00(n)