

# ID 220

## Средство для дезинфекции вращающихся инструментов



ID 220 to bardzo skuteczny, gotowy do użytku roztwór umożliwiający samodzielną dezynfekcję i czyszczenie obrotowych instrumentów stomatologicznych (Wiertła i frezy ze stali, stali nierdzewnej, stopów twardych, instrumenty diamentowe, instrumenty do leczenia kanałowego itp.). ID 220 jest delikatny dla materiałów dzięki specjalnym inhibitorom korozji.

Состав: 100 г средства ID 220 содержат: 1-пропанол 15 г, гидроокись калия, комплексирующие агенты, ингибиторы коррозии.

Спектр действия: бактерицид, туберкулоцид, фунгицид, вирулоцидный (вирусы с оболочкой, типа Vaccinia-вирусов, вкл. вирусы гепатита В, гепатита С и ВИЧ<sup>1)</sup>), а также безоболочечные вирусы типа Adeno-вирусов, Polyoma-вирусов SV 40, Nого-вирусов, Polio-вирусов). Занесен в список VАН. Проверено в соответствии с EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) В соответствии с рекомендацией Института Роберта Коха (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Применение: инструменты после использования немедленно погрузить в средство ID 220. Время воздействия во фрезаторе составляет 1 минут, для инактивации вирусов - 1 минут. Дезинфицированные инструменты извлечь из емкости, сполоснуть проточной водой, немедленно просушить, при необходимости произвести стерилизацию. Срок годности рабочей жидкости составляет максимум 7 дней. В случае сильного загрязнения кровью, слюной и т. д. рекомендуем два-три раза в неделю заменять раствор. Дополнительные указания - см. также информацию о продукте на нашем сайте.

Указания: не погружать в препарат ID 220 изделия из материалов, чувствительных к щелочам и спиртам, таких как напр. из легких и цветных металлов (алюминий, латунь и т.д.), а также изделия, склеенные искусственными смолами. Для этого используется средство ID 212 ID 212 forte или ID 213. При работе с борами и фрезами из твердых сплавов, с инструментами для обработки корневых каналов, оснащенных ручкой с цветной маркировкой, с керамическими абразивными инструментами и с эластичными полирами следует убедиться в том, что они совместимы с раствором ID 220.

# ID 220

## Средство для дезинфекции вращающихся инструментов

Опасность. Жидкость и пар способны воспламеняться.

Вызывает тяжелые повреждения глаз. Вызывает раздражение кожи. Не распылять на открытое пламя или другой источник возгорания. Носить защитные перчатки и защитные очки/маску. При раздражении или сыпи на коже:

проконсультироваться у врача/обратиться за медицинской помощью. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза. Хранить емкость плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте. Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов.

CE 0297