Для смены языка в рабочей версии программы HandyDentist следуйте инструкции:

1. Нажмите правой клавишей на ярлык программы HandyDentist и выберете пункт «Расположение файла»



3. В папку Languages перетащите полученный файл Russian. Система предупредит: В папке назначения уже есть файл «Russian.ini». Выбирайте: «Заменить файл в папке назначения»

Файл Главная Подел ← → × ↑ 📜 « Наг	илься Вид ndyDentist > Langua	ges 🗸 О 🖓 Поиск в:	Languages	~ (- □ × ~ ⊘		
 Выстрый доступ Рабочий стол * Загрузон * Документы * Документы * Налду Рогt X4 Инструкции и тех.г Музыка ОпеDrive Этот компьютер USB-накопитель (E) Сеть Злементов: 14 	Hus 응) Czech 응) English 응) French 응) Hungarian 응) Huigarian 응) Huilain 응) Politih 위) Portuguese 응) Russian 응) Spanish 응) Turkish 응) Turkish 응) 简体中文 응) 驚體中文	 Дата изменения 20.08.2021 8:59 20.08.2021 8:59 20.08.2021 8:59 20.08.2021 8:59 20.08.2021 8:59 20.08.2021 8:59 3амена или пропуск файлов Копирование 1 элемента из Наподу в Langu В папке назначения уже есть фа Заменить файл в папке назначения уже есть фа Заменить файл в папке назначения уже есть файл Пропустить этот файл Сравнить файлы 	Тип Параметры конф Параметры конф парамет	Размер 34 КБ 38 КБ 36 КБ 35 КБ 34 КБ 34 КБ 34 КБ 35 КБ 33 КБ 55 КБ 33 КБ 25 КБ 26 КБ 26 КБ	P Toyoc B: 1 Menerula 22 15:31 22 10:52 22 9:56 022 16:00 022 12:10 022 12:10 022 9:59 022 9:49	налоў Тип Палка с файлами Файл "АСТ" Параметры конф Скатая 2/Р-палса Параметры конф Місгозоft Едер РО Місгозоft Едер РО	Размер 1 КБ 38 КБ 7 544 КБ 35 КБ 2 813 КБ 15 088 КБ 865 КБ		06-07-2022.
Fradox SUMA SUREpocon Discritice 7d Sanac Alcocott Edge		 Меньше сведений 			Телефонный справочни			20220706-1. Корзина	поездил Полезное Оннтези

Приятного использования ПО HandyDentist!

Активация Лицензии:

Заходим в Помощь Выбираем Лицензия Заполняем название компании и эл. Почту. Нажимаем экспортировать файл (рядом с Generate code) и указываем папку на компьютере. Отправляем файл на почту: support@handycreate.com Затем придет ответное письмо с файлом. Файл сохраняем на компьютере Заходим в Помощь Выбираем Лицензия Нажимаем Порт файл (внизу, где Activate Code)

BCE FOTOBO!