

Инструкция по эксплуатации бестеневого налобного осветителя ITS-X.PRO

1. Описание

Осветитель налобный бестеневого освещения ITS-x.pro предназначен для дополнительной подсветки мало-освещённых участков объекта исследования. Осветитель представляет собой два источника света, закрепленных на пластиковой регулируемой эргономичной дуге. Осветитель состоит из блока осветителя и блока питания, закреплённых с разных сторон пластиковой эргономической дуги.

2. Комплектации

| состав \ модель | ITS-10 | ITS-11 | ITS-12 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Бестеновой осветитель | * | * | * |
| Аккумуляторная батарея | * | * | * |
| Блок зарядки | * | * | * |
| Светофильтры | * | * | * |
| Упаковочная сумка | * | * | * |
| Инструкция по эксплуатации | * | * | * |
| Линзы в оправе | | * | |
| Биноклярные лупы | | | * |

3. Использование

- вставьте литиевую батарею в специальный отсек, расположенный на затылочной стороне дуги.
- проверьте включение светильника путем опускания модуля освещения в нижнее положение.
- эргономическую дугу отрегулируйте по размеру головы пользователя с помощью гребенчатого ползунка.
- отрегулируйте яркость свечения можно вращением регулировочного колеса расположенного с верхней правой стороны аккумуляторного отсека.
- запрещается прикладывать чрезмерное усилие к подвижным механизмам и деталям осветителя!

4. Меры предосторожности

- Избегайте излишнего давления на детали осветителя в процессе настройки.
- Избегайте попадания влаги в отсек с аккумулятором.

5. Устранение неисправностей

| | неисправность | причина | метод устранения |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Низкий уровень яркости при регулировании до макс | Разрядился аккумулятор | Зарядить в зарядном устройстве |
| 2 | Не заряжается аккумулятор | Неисправность кабеля зарядки | Заменить кабель на исправный |

Устройство осветителя

