



1. Описание устройства

Данное устройство используется в промышленной среде и предназначено для удаления пыли и мелких отходов.

2. Характеристики устройства

- Простая и интуитивно понятная конструкция, позволяющая легко обслуживать двигатель и менять фильтры
- Небольшой вес и габариты устройства позволяют с лёгкостью разместить его в любой зуботехнической лаборатории
- Мощный и долговечный щеточный электромотор обеспечивает высокое постоянное всасывание воздуха

3. Основные технические параметры

- Источник питания:
 - 220 В, 50 Гц \pm 10%;
 - 110 В, 60 Гц \pm 10%
- Мощность: 500 Вт
- Размеры: 300*230*330 мм

4. Работа с устройством

- 1) Откройте дверцу корпуса устройства и проверьте положение пылевого мешка
- 2) Подсоедините шланг к ветровому отверстию
- 3) Включите питание и отрегулируйте скорость вращения мотора для установки необходимой силы всасывания

5. Примечания

- 1) Перед работой проверяйте целостность кабеля питания.
- 2) Избегайте контакта кабеля питания устройства с острыми предметами.
- 3) Выключайте устройство и вынимайте вилку кабеля питания из розетки, когда устройство не используется.
- 4) Своевременно опустошайте пылевой мешок устройства.
- 5) Производите замену пылевого мешка каждые 3–6 месяцев, а также замену фильтра устройства каждые 300 часов работы.
- 6) Не подвергайте устройство чрезмерному внешнему воздействию, не допускайте контакта с водой или другими опасными веществами.

6. Послепродажное обслуживание

- 1) Устройство предназначено для использования в промышленных условиях. Гарантия на устройство составляет полгода.
- 2) Пылевой мешок и фильтр являются одноразовыми аксессуарами устройства. Гарантия на них не распространяется.
- 3) По любым вопросам в течение гарантийного срока обращайтесь к уполномоченному представителю или напрямую к производителю.

7. Схема устройства

