

# JG-208 - пылесос зуботехнический с возможностью подключения двух рабочих мест



Поздравляем вас с покупкой обновленного пылесоса JG-208, рассчитанного на два рабочих места.

Для начала работы с пылесосом подсоедините переходник для шланга (13) к выходному отверстию устройства (12), подключите шланг (14) к переходнику и включите питание устройства. Светодиодный дисплей начнет отсчитывать часы работы устройства и подаст сигнал тревоги после 400 часов работы. При получении сигнала необходимо отключить питание устройства, заменить угольную щетку мотора (4) и очистить воздушный фильтр.

Мешок для сбора пыли необходимо опорожнять каждый день. Для более эффективной работы устройства и защиты мотора от поломок рекомендуется менять мешок каждые две недели.

#### 1. Чистка и замена мешка для пыли

- Выключите питание устройства
- Откройте переднюю крышку корпуса
- Нажмите на пружинную пластину над мешком пылесборника
- Снимите и опустошите мешок или проведите его замену на новый

#### 2. Замена угольной щетки

- Выключите питание устройства
- Откройте заднюю крышку устройства и снимите электромотор с электрического блока управления,
- Откройте также переднюю крышку и снимите воздушный фильтр (8) (крепится на винты)
- Открутите два винта полки крепления мотора (9), вытащите электромотор (5) и полку крепления электромотора (9) вместе
- Отсоедините кабель от короба угольных щеток (4), расположенного сверху с двух сторон электромотора
- Используя острый предмет, открутите два винта из короба угольных щеток, замените старые щетки на новые (Примечание: всегда производите одновременную замену обеих щеток)
- После замены угольной щетки очистите воздушный фильтр (8) сухой щеткой (или продуйте его сухим воздухом из воздушного компрессора)
- Сбросьте счетчик рабочего времени, расположенный на задней стороне электрического блока управления, чтобы отсчет пошел с нуля

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Очищайте мешок для сбора пыли каждый день
2. Меняйте мешок каждые две недели
3. Производите замену угольных щеток и воздушного фильтра каждые 400 часов работы

**Внимание:** Перед началом работы удалите все дополнительные аксессуары, находящиеся внутри корпуса устройства (переходники и др.)

