

Вакуумный смеситель Jinguang ZKJ-3

Описание

Вакуумный смеситель используется для перемешивания и вибрирования заготовок и материалов для заливки. Поскольку процесс перемешивания осуществляется в условиях вакуума, материал не содержит пузырьки воздуха, что повышает прочность и компактность заливки.

Спецификация

Напряжение питания	220V±10%, 50Гц
Мощность	150W
Ёмкость чаши	500мл
Вес в упаковке	27кг
Размеры упаковки	43x43x59см

Подготовка

Данный вакуумный миксер — оборудование настольного типа; для нормальной работы необходимо подключение воздушного компрессора. Распакуйте упаковку, затем проверьте, все ли принадлежности внутри. Подключите машину к источнику питания. Затем оборудование можно использовать, следуя инструкции.

Порядок работы

- 1.Залейте масло в вакуумный насос (до линии). Убедитесь, что масло находится в пределах +/- 5 мм от линии уровня масла во время использования.
- 2.Подсоедините провод питания к смесительной машине.
- 3.Включите машину в сеть.
- 4.Перемешайте материал внутри вакуумной чаши до пастообразного состояния.
- 5.Закрутите болт выпуска воздуха. Включите машину и установите время смешивания. Нажмите кнопку вакуумного насоса. Плотно подсоедините вакуумную чашу к машине, а затем нажмите кнопку смешивания.
- 6.После завершения смешивания выключите машину.
- 7.При необходимости, используйте нижнюю часть - вибростол.

Меры предосторожности

1. Перед использованием прочтите все этапы эксплуатации, чтобы избежать повреждений.
2. Запрещается включать масляный насос без масла.
3. Не допускайте работу масляного насоса вхолостую.
4. Не разбирайте машину без профессиональных инструкций.
5. Регулярно проверяйте заземление машины. Убедитесь, что между корпусом машины и землей имеется надежное соединение.
6. Не заполняйте чашу более, чем наполовину во избежание блокировки вакуумного контура.