

Инструкция по эксплуатации  
SURGtorque S459 C - 3.000.5063



KaVo. Dental Excellence.

**Сбыт:**

KaVo Dental GmbH  
Bismarckring 39  
D-88400 Biberach  
Тел. +49 7351 56-0  
Факс +49 7351 56-1488

**Изготовитель:**

Kaltenbach & Voigt GmbH  
Bismarckring 39  
88400 Biberach, Германия  
[www.kavo.com](http://www.kavo.com)

**Оглавление**

<b>1</b>	<b>Информация для пользователей.....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Безопасность.....</b>	<b>9</b>
2.1	Указания по технике безопасности.....	9
2.2	Указания по технике безопасности.....	12
<b>3</b>	<b>Описание оборудования.....</b>	<b>19</b>
3.1	Целевое назначение – Использование по назначению.....	20
3.2	Технические характеристики.....	22
3.3	Условия транспортировки и хранения.....	24
<b>4</b>	<b>Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации.....</b>	<b>26</b>
4.1	Контроль расхода воды.....	29
4.2	Контроль давлений.....	30
<b>5</b>	<b>Эксплуатация.....</b>	<b>33</b>
5.1	Установка изделия.....	34
5.2	Снятие изделия.....	35
5.3	Установка фрез или алмазных шлифовальных инструментов.....	36

5.4	Удаление твердосплавных фрез или алмазных шлифовальных инструментов.....	42
<b>6</b>	<b>Устранение неисправностей.....</b>	<b>44</b>
6.1	Замена кольцевого уплотнителя на MULTiflex (LUX)/ MULTiflex LED coupling.....	44
6.2	Очистка впрыскивающей форсунки.....	46
<b>7</b>	<b>Методы обработки согласно ISO 17664.....</b>	<b>47</b>
7.1	Подготовка в месте применения.....	47
7.2	Очистка.....	49
7.2.1	Ручная наружная очистка.....	49
7.2.2	Машинная наружная очистка.....	50
7.2.3	Ручная внутренняя очистка.....	51
7.2.4	Машинная внутренняя очистка.....	53
7.3	Дезинфекция.....	54
7.3.1	Ручная наружная дезинфекция.....	55
7.3.2	Ручная внутренняя дезинфекция.....	56
7.3.3	Машинная наружная и внутренняя дезинфекция.....	57
7.4	Сушка.....	58

7.5 Средства и системы для ухода - техническое обслуживание.....	59
7.5.1 Уход с помощью спрея KaVo.....	61
7.5.2 Уход при помощи распылителя KaVo SPRAYrotor.....	63
7.5.3 Уход с помощью KaVo QUATTROcare PLUS.....	63
7.6 Упаковка.....	67
7.7 Стерилизация.....	68
7.8 Хранение.....	70
<b>8 Вспомогательные средства.....</b>	<b>71</b>
<b>9 Гарантийные условия.....</b>	<b>74</b>



## 1 Информация для пользователей





Многоуважаемый пользователь!

KaVo предлагает вам свое новое высококачественное изделие. Для обеспечения бесперебойной, экономной и безопасной работы следует соблюдать приведенные ниже указания.

© KaVo Dental GmbH

### Символы

	См. главу «Техника безопасности/предупреждающий знак»
	Важная информация для пользователей и технических специалистов

	Стерилизация паром 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F)
	Термодезинфекция
	Маркировка CE (Communauté Européenne). Изделие с этой маркировкой отвечает требованиям соответствующей директивы ЕС.
	Действия, которые нужно выполнить

## **Целевая группа**

Данный документ предназначен для врача-стоматолога и его ассистента. Глава "Ввод в эксплуатацию" предназначена также для технических специалистов.



## 2 Безопасность

### 2.1 Указания по технике безопасности



Предупреждающий знак

#### Структура



## ОПАСНОСТЬ

**Во введении описывается вид и источник опасности.**

В данном разделе описаны возможные последствия несоблюдения указаний.

- ▶ Опциональная операция содержит необходимые меры по предотвращению опасностей.

---

## Описание степеней опасности

Приведенные здесь указания по технике безопасности с тремя уровнями опасности служат для предотвращения материального ущерба и травм.



 **ОСТОРОЖНО!**

**ОСТОРОЖНО!**

обозначает опасную ситуацию, которая может приводить к материальному ущербу или легким или средней тяжести травмам.

---



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

обозначает опасную ситуацию, которая может привести к тяжелым или смертельным травмам.



## ОПАСНОСТЬ

### ОПАСНОСТЬ

обозначает максимальный риск в связи с ситуацией, которая может приводить непосредственно к тяжелым или смертельным травмам.

## 2.2 Указания по технике безопасности



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

#### **Опасность для врача и пациента.**

При повреждениях, вызванных неправильным хранением изделия, нетипичным нагревом, слишком сильной вибрацией или непрочной вставленной фрезой или шлифовальным инструментом.

- ▶ Прекратить работу и проинформировать сервисную службу.



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

### **Опасность из-за противопоказаний.**

При травмировании мягких тканей в полости рта имеется опасность того, что сжатый воздух может внести септические субстанции в ткань.

- ▶ В случае травмирования мягких тканей в полости рта запрещается продолжение лечения с использованием инструмента с пневмоприводом.



## **ОСТОРОЖНО!**

### **Опасность из-за неверно уложенного инструмента.**

Травмы и заражение зажатой фрезой или шлифовальным инструментом.

Повреждение зажимной системы из-за падения инструмента.

- ▶ Фреза или шлифовальный инструмент после лечения должен быть уложен в держатель.



## **ОСТОРОЖНО!**

**Опасность получения ожогов из-за горячей головки или крышки инструмента.**

При перегреве инструмента могут быть получены ожоги в полости рта.

- ▶ Не касаться мягких тканей головкой или крышкой инструмента!



## **ОСТОРОЖНО!**

Преждевременный износ и неисправности из-за неправильной укладки на хранение перед длительными перерывами в работе.

Сокращение срока службы изделия.

- ▶ Перед длительными перерывами в работе необходимо в соответствии с руководством очистить медицинское изделие, выполнить операции по уходу, после чего хранить в сухих условиях.



## **Указание**

В целях безопасности после истечения гарантийного срока мы рекомендуем ежегодную проверку системы крепления инструментов.



К выполнению ремонта и технического обслуживания изделия KaVo допускаются:

- Технические специалисты представительств KaVo во всем мире
- Технические специалисты, обученные специально в компании KaVo

Для обеспечения бесперебойной работы необходимо обрабатывать медицинское изделие методами обработки, описанными в инструкции по эксплуатации оборудования KaVo, и применять указанные средства и системы для ухода. KaVo рекомендует установить периодичность технического обслуживания, при которой специализированной фирмой проводится анализ медицинского изделия в отношении очистки, обслуживания и функционирования. Данная периодичность должна соответствовать частоте использования оборудования.

---

Обслуживание разрешается проводить только обученному в компании KaVo персоналу ремонтных мастерских, который использует оригинальные запасные части от KaVo.

### 3 Описание оборудования



SMARTtorque S609 C (Арт. № 1.008.1644)



SMARTtorque Mini S605 C (Арт. № 1.008.1645)

### 3.1 Целевое назначение – Использование по назначению

#### Целевое назначение:

Данное изделие

- предназначено только для использования в стоматологической практике для стоматологического лечения. Любое использование не по назначению или изменение изделия не допускается и может представлять опасность. Медицинское изделие предназначено для использования в следующих случаях: удаление кариозного материала, препарация полостей и коронок, удаление пломб, обработка поверхностей зубов и реставрируемых поверхностей.
- является медицинским изделием согласно действующему национальному законодательству.

### **Использование по назначению:**

Согласно этим положениям, данное изделие разрешается применять только опытным пользователям и только в описанных целях. При этом необходимо соблюдать

- действующие правила охраны труда;
- действующие правила предупреждения несчастных случаев;
- данную инструкцию по эксплуатации

Согласно этим положениям пользователь обязан:

- использовать только исправное оборудование;
- использовать оборудование строго по назначению;
- следить за своей безопасностью, а также за безопасностью пациентов и третьих лиц;

- не допускать заражения при пользовании изделием.

### 3.2 Технические характеристики

	SMARTtorque S609 C	SMARTtorque Mini S605 C
Минимальное приводное давление	2,1 бар (30 фкд)	2,1 бар (30 фкд)
Приводное давление	2,1–4,2 бар (30–61 фкд)	2,1–4,2 бар, (30–61 фкд)
Расход воздуха	42 норм. л/мин	41 норм. л/мин
Скорость вращения на холостом ходу	от 350 000 до 400 000 мин. <sup>-1</sup>	от 350 000 до 450 000 мин. <sup>-1</sup>
Мощность	> 15 Вт	> 12 Вт
Размер головки	Стандартный	Мини

	SMARTtorque S609 C	SMARTtorque Mini S605 C
Рекомендуемое рабочее давление	2–3 Н	2–3 Н



## Указание

Значения расхода воздуха, частоты вращения на холостом ходу и мощности были измерены при развиваемом давлении 2,8 бар (40 psi).

Может подсоединяться ко всем разъемам Midwest с 4 отверстиями.

### 3.3 Условия транспортировки и хранения



#### **ОСТОРОЖНО!**





**Опасность при вводе медицинского оборудования в эксплуатацию после хранения в холодном помещении.**

Это может привести к отказу оборудования.

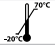- ▶ Холодное оборудование перед вводом в эксплуатацию довести до температуры 20 °C - 25 °C (68 °F - 77 °F).

	Температура: от -20 °C до +70 °C (от -4 °F до +158 °F)
	Относительная влажность воздуха: от 5 % до 95 %, без образования конденсата



	Атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа (от 10 psi до 15 psi)
	Защищать от воздействия влаги

## 4 Ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**



#### **Опасность из-за нестерильных изделий.**

Опасность заражения врача и пациента.

- ▶ Перед первым вводом в эксплуатацию и после каждого использования выполнять соответствующую подготовку и, при необходимости, стерилизацию продукта и принадлежностей.



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Утилизируйте изделие надлежащим образом.**

Перед утилизацией произведите соответствующую подготовку изделия и принадлежностей или (при необходимости стерилизацию).



## **ОСТОРОЖНО!**

**Повреждения из-за загрязненного и влажного охлаждающего воздуха.**

Загрязненный и влажный охлаждающий воздух может стать причиной неисправности.

- ▶ Необходимо обеспечить подачу сухого, очищенного и не содержащего загрязнений охлаждающего воздуха в соответствии с требованиями EN ISO 7494-2.

## 4.1 Контроль расхода воды


### **ОСТОРОЖНО!**



#### **Перегрев зуба из-за недостаточной подачи воды.**

Недостаточное количество спрей-воды может приводить к перегреву изделия, термическому повреждению пульпы и к повреждению зуба.

- ▶ Расход воды для охлаждения распылением установить на величину не менее 50 см<sup>3</sup>/мин!
- ▶ Проверить каналы спрей-воды и при необходимости очистить форсунки иглой **Арт. № 1.003.8150.**

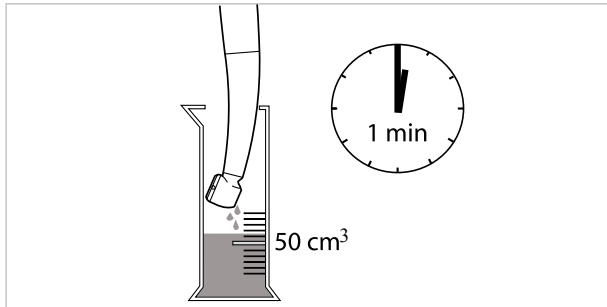

**4.2 Контроль давлений**




## **ОСТОРОЖНО!**

### **Подключение подачи сжатого воздуха на устройства.**

Работа на загрязнённом и влажном сжатом воздухе ведет к преждевременному износу.

- ▶ Обеспечьте подачу сухого, очищенного и не содержащего загрязнений сжатого воздуха, соответствующего требованиям EN ISO 7494-2.

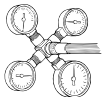

- ▶ Установить контрольный манометр (**Арт. № 04118731**) между шлангом и изделием и проверить давление:

⇒ приводное давление, рекомендованное приводное давление, давление обратного воздуха, давление воды в распылителе и давление воздуха в распылителе.

**См. также:**

 3.2 Технические характеристики, Страница 22

Более высокое развиваемое давление автоматически понижается.



## 5 Эксплуатация



### Указание

Перед началом каждого рабочего дня следует не менее 2 минут промывать проводящие воду системы (со снятыми передающими инструментами), а при опасности заражения из-за возврата/обратного подсоса необходимо, при известных обстоятельствах, выполнять процедуру промывки после каждого пациента, в течение 20 - 30 секунд.

## 5.1 Установка изделия


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



#### Отсоединение изделия во время лечения.

Неправильно подсоединенное изделие может отсоединиться от шланга во время лечения.

- ▶ Перед каждым применением слегка потяните за изделие для проверки надежности его подсоединения к шлангу.

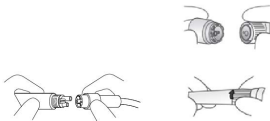

- ▶ Подсоединить к шлангу соединительный элемент изделия, повернув его по часовой стрелке.



- ▶ Потянув, проверить надежность фиксации изделия на шланге.

## Указание

Количество воды можно регулировать на переходнике или на лечебном блоке.

### 5.2 Снятие изделия

- ▶ Отсоединить соединительный элемент изделия от шланга, повернув его против часовой стрелки.

### 5.3 Установка фрез или алмазных шлифовальных инструментов

#### Указание



Используйте только твердосплавные фрезы или алмазные шлифовальные инструменты, соответствующие стандарту EN ISO 1797-1 тип 3, выполненные из стали или твердого сплава и отвечающие следующим критериям:

- диаметр хвостовика: 1,59–1,60 мм
- общая длина SMARTtorque S609 C: не более 25 мм
- общая длина SMARTtorque Mini S605 C: не более 21 мм
- длина фиксируемой части хвостовика SMARTtorque S609 C: не менее 11 мм

- длина фиксируемой части хвостовика SMARTtorque Mini S605 C: не менее 9 мм
- диаметр режущей части: не более 2 мм

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Использование не допущенных к применению фрез или шлифовальных инструментов.**



Травмирование пациента или повреждение медицинского изделия.

- ▶ Соблюдать инструкцию по эксплуатации и использовать фрезу или шлифовальный инструмент по назначению.
- ▶ Использовать только фрезы или шлифовальные инструменты, не отличающиеся от указанных данных.



## **ОСТОРОЖНО!**

**Травмы из-за использования изношенных фрез или шлифовальных инструментов.**

Инструменты могут выпасть во время лечения и травмировать пациента.

- ▶ Не использовать фрезы или шлифовальные инструменты с изношенными хвостовиками.



## **ОСТОРОЖНО!**

Опасность травмирования фрезой или шлифовальным инструментом.

Инфекция или порезы.

- ▶ Носить перчатки или напальчники.




## **ОСТОРОЖНО!**

### **Опасность из-за неисправной зажимной системы.**

Фреза или шлифовальный инструмент может выпасть и привести к травмам.

- ▶ Потянув за фрезу или шлифовальный инструмент, проверить, в порядке ли зажимная система и фиксируется ли фреза или шлифовальный инструмент. Для проверки, установки и извлечения следует использовать перчатки или пальчики, т.к. в противном случае возникает опасность травмирования и/или занесения инфекции.



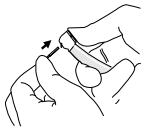

- ▶ Кнопку сильно прижать большим пальцем и одновременно вставить фрезу или шлифовальный инструмент до упора.
- ▶ Потянув, проверить прочность крепления фрезы или шлифовального инструмента.

## 5.4 Удаление твердосплавных фрез или алмазных шлифовальных инструментов


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность из-за вращающейся фрезы или шлифовального инструмента.

Порезы и повреждения зажимной системы.

- ▶ Не касаться вращающейся фрезы или шлифовального инструмента!
- ▶ Запрещается нажимать кнопку при вращающейся фрезе или шлифовальном инструменте.
- ▶ После завершения обработки вытащите фрезу/шлифовальный инструмент из углового наконечника, чтобы предотвратить травмы и заражение при укладывании.



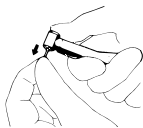

- ▶ После остановки фрезы или шлифовального инструмента сильно нажать кнопку большим пальцем и одновременно вытащить фрезу или шлифовальный инструмент.

## 6 Устранение неисправностей

### 6.1 Замена кольцевого уплотнителя на MULTiflex (LUX)/ MULTiflex LED coupling



#### **ОСТОРОЖНО!**

Опасность из-за неправильно ухода за уплотнительными кольцами.

Неполадки или полный выхода из строя медицинского изделия.

- ▶ Не использовать вазелин или другую консистентную смазку или масло.



## Указание

Уплотнительные кольца на переходнике разрешается смазывать только ватным тампоном, смоченным средством KAVO Spray.

- ▶ Уплотнительное кольцо сжать пальцами, чтобы образовалась петля.
- ▶ Кольцо сместить вперед и снять.
- ▶ Новые уплотнительные кольца установить в канавки.

## 6.2 Очистка впрыскивающей форсунки

 **ОСТОРОЖНО!**

**Опасность из-за недостаточной подачи спрей-воды.**

Перегрев изделия и повреждение зуба.

- ▶ Проверить каналы спрей-воды и, при необходимости, очистить форсунки иглой **Арт. № 1.003.8150**.



- ▶ Иглой для прочистки форсунок **Арт. № 1.003.8150** очистите водяной канал впрыскивающей форсунки.

## 7 Методы обработки согласно ISO 17664

### 7.1 Подготовка в месте применения



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

#### **Опасность из-за нестерильных изделий.**

Из-за зараженных медицинских изделий существует опасность инфицирования.

- ▶ Принять соответствующие меры по защите людей.
- ▶ Незамедлительно удалите остатки цемента, композита или крови.
- ▶ Выполняйте обработку медицинского изделия как можно скорее после его использования.

- ▶ Извлеките фрезу или шлифовальный инструмент из медицинского изделия.
- ▶ Медицинское изделие следует доставлять на место обработки в сухом виде.
- ▶ Не помещайте в растворы и т. п.



## 7.2 Очистка



### **ОСТОРОЖНО!**

Неисправности из-за очистки в ультразвуковом аппарате.


Повреждение изделия.

- ▶ Очищать только в термодезинфекторе или вручную!

### 7.2.1 Ручная наружная очистка

Необходимые принадлежности:

- Питьевая вода  $30\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$  ( $86\text{ °F} \pm 10\text{ °F}$ )
- Щетка, например, зубная щетка средней жесткости

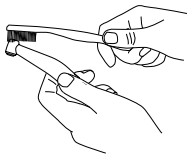

- ▶ Очистить щеткой под потоком питьевой воды.



## 7.2.2 Машинная наружная очистка

KaVo рекомендует использовать термодезинфекторы, соответствующие стандарту EN ISO 15883-1 и используемые с щелочными чистящими средствами.

- ▶ Настройки программы и применяемые чистящие и дезинфицирующие средства приведены в инструкции по эксплуатации термодезинфектора.

- ▶ Во избежание повреждения медицинского изделия KaVo следует убедиться, что по окончании цикла медицинского изделия снаружи и внутри сухое, и сразу после этого смазать его специальным средством системы для ухода KaVo.

### 7.2.3 Ручная внутренняя очистка

Возможна только с применением KaVo CLEANspray и KaVo DRYspray.

- ▶ Укрыть на медицинское изделие пакетом KaVo Cleanpac и надеть его на соответствующий адаптер для ухода. Нажать распылитель аэрозоля 3 раза по 2 секунды. Снять медицинское изделие с насадки и оставить чистящее средство действовать на одну минуту.
- ▶ Затем 3 - 5 секунд промывать средством KaVo DRYspray.

**См. также:**

📄 Инструкция по применению KaVo CLEANspray / KaVo DRYspray

## Указание

KaVo CLEANspray и KaVo DRYspray для внутренней очистки вручную поставляются только в следующих странах:

Германия, Австрия, Швейцария, Италия, Испания, Португалия, Франция, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Дания, Швеция, Финляндия и Норвегия.

В других странах осуществляется только внутренняя машинная очистка с помощью термодезинфекторов согласно стандарту EN ISO 15883-1.





## 7.2.4 Машинная внутренняя очистка

KaVo рекомендует использовать термодезинфекторы, соответствующие стандарту EN ISO 15883-1 и используемые с щелочными чистящими средствами.

- ▶ Настройки программы и применяемые чистящие и дезинфицирующие средства приведены в инструкции по эксплуатации термодезинфектора.
- ▶ Во избежание повреждения медицинского изделия KaVo следует убедиться, что по окончании цикла медицинского изделия снаружи и внутри сухое, и сразу после этого смазать его специальным средством системы для ухода KaVo.

### 7.3 Дезинфекция




#### **ОСТОРОЖНО!**

Неисправности из-за использования емкости для дезинфекции или содержащего хлор дезинфицирующего средства.

Повреждение изделия.

- ▶ Дезинфицировать только в термодезинфекторе или вручную!

### 7.3.1 Ручная наружная дезинфекция

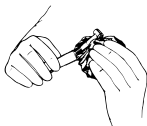

KaVo рекомендует на основе совместимости материалов следующие изделия. Микробиологическая эффективность должна быть обеспечена производителем дезинфицирующего средства.

- Mikroqid AF Liquid фирмы Schülke & Mayr (жидкость или салфетки)
- FD 322 фирмы Dürr
- CaviCide фирмы Metrex

Необходимые вспомогательные средства:

- Салфетки для очистки изделия.

- ▶ Дезинфицирующее средство разбрызгать на салфетку, затем протереть ею изделие и оставить действовать согласно инструкции изготовителя дезинфицирующего средства.
- ▶ Соблюдайте инструкцию по использованию дезинфицирующего средства.

### **7.3.2 Ручная внутренняя дезинфекция**

Эффективность ручной внутренней дезинфекции должна быть документально подтверждена производителем дезинфицирующего средства. Для изделий KaVo разрешается использовать только дезинфицирующие средства, допущенные KaVo с точки зрения совместимости материалов (напр., WL-cid/фирма ALPRO).

- ▶ Соблюдать инструкцию по использованию дезинфицирующего средства.



- ▶ Сразу после проведения внутренней дезинфекции смажьте медицинское изделие KaVo специальными средствами, входящими в систему для ухода KaVo.

### 7.3.3 Машинная наружная и внутренняя дезинфекция



KaVo рекомендует использовать термодезинфекторы, соответствующие стандарту EN ISO 15883-1 и используемые с щелочными чистящими средствами.

- ▶ Настройки программы и применяемые чистящие и дезинфицирующие средства приведены в инструкции по эксплуатации термодезинфектора.
- ▶ Во избежание повреждения медицинского изделия KaVo следует убедиться, что по окончании цикла медицинского изделия снаружи и внутри сухое, и сразу после этого смазать его специальным средством системы для ухода KaVo.

## 7.4 Сушка

### Ручная сушка

- ▶ Сжатым воздухом обдуть снаружи и продуть изнутри, чтобы исчезли все капли воды.

### Машинная сушка

Как правило, сушка является составной частью программы термодезинфектора.

- ▶ Соблюдать инструкцию по эксплуатации термодезинфектора.

## 7.5 Средства и системы для ухода - техническое обслуживание



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**В медицинское изделие вставлена острая фреза или шлифовальный инструмент.**

Существует опасность быть травмированным острой или заостренной фрезой или шлифовальным инструментом.

- ▶ Извлечь фрезу или шлифовальный инструмент.



## **ОСТОРОЖНО!**

**Преждевременный износ и неисправности вследствие ненадлежащего технического обслуживания и ухода.**

Сокращение срока службы изделия.

- ▶ Регулярно проводите надлежащее техническое обслуживание и уход!




## **Указание**

KaVo предоставляет гарантию безупречного функционирования изделий KaVo только при использовании средств ухода, указанных в списке вспомогательных средств, т.к. именно они проверены на пригодность для наших изделий при соответствующем применении.

### 7.5.1 Уход с помощью спрея KaVo

Компания KaVo рекомендует выполнять уход за изделием после каждого применения, то есть после каждой машинной очистки и перед каждой стерилизацией.

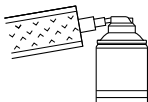

- ▶ Извлеките фрезу или шлифовальный инструмент.
- ▶ Наденьте на изделие пакет Cleanpac.
- ▶ Насадите изделие на канюлю и нажимайте на распылитель аэрозоля в течение одной секунды.


### Цанговый зажим. Уход.

Фирма KaVo рекомендует чистить систему зажима и, соответственно, выполнять уход за ней один раз в неделю.



- ▶ Извлечь фрезу или шлифовальный инструмент и, вставив наконечник распылительного сопла INTRA в отверстие, выполнить распыление.
- ▶ Затем обработайте с использованием указанных ниже средств и систем для ухода.

### 7.5.2 Уход при помощи распылителя KaVo SPRAYrotor

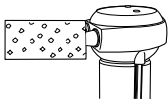


- ▶ Присоединить изделие к подходящему переходнику распылителя SPRAYrotor и надеть на него пакет Cleanpac.
- ▶ Выполнить уход за изделием.

**См. также:**

- 📄 Инструкция по применению KaVo SPRAYrotor

### 7.5.3 Уход с помощью KaVo QUATTROcare PLUS

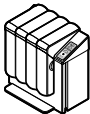

- ▶ Извлеките фрезу или шлифовальный инструмент.

- ▶ Для ухода за изделием используйте QUATTROcare PLUS.

**См. также:**

- 📄 Инструкция по эксплуатации KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A

**Уход за цанговым зажимом**

Фирма KaVo рекомендует чистить систему зажима и, соответственно, выполнять уход за ней 1 раз в неделю.

**См. также:**

- 📄 Инструкция по эксплуатации KaVo QUATTROcare PLUS 2124 A





## Указание

Перед началом ухода за цанговым зажимом поместите ручные инструменты в удаленное от муфт ухода место.



- ▶ Извлеките муфту ухода для цангового зажима из боковой дверцы QUATTROcare PLUS и насадите ее на муфту, место четыре (крайнее справа). На ней должен быть установлен адаптер MULTIflex.
- ▶ Направляющей втулкой цангового зажима, за которым нужно выполнить уход, прижмите инструмент к острому концу муфты ухода для цангового зажима.

- ▶ Нажмите клавишу с символом режима ухода за цанговым зажимом.



## Указание

### **Завершите работу в режиме ухода за цанговым зажимом.**

Вариант 1: укомплектуйте QUATTROcare PLUS 2124 A инструментами, закройте переднюю крышку и начните процедуру ухода.

Вариант 2: если операция ухода не выполняется, прибор автоматически переключается в обычный режим ухода через три минуты.

#### **См. также:**

-  Уход при помощи KaVo QUATTROcare PLUS

## 7.6 Упаковка



### Указание

Стерилизационный пакет должен быть достаточно большим для инструмента, чтобы упаковка не находилась под механическим натяжением.

Стерилизационная упаковка должна удовлетворять существующим нормам относительно качества и применения и быть пригодной для процедуры стерилизации!

- ▶ Заварите каждое медицинское изделие в отдельную стерильную упаковку!

## 7.7 Стерилизация

Стерилизация в паровом стерилизаторе (автоклаве)  
согласно EN 13060/ISO 17665-1



 **ОСТОРОЖНО!**

Преждевременный износ и выход из строя в результате  
неправильного обслуживания и ухода.

Сокращение срока службы изделия.

- ▶ Перед каждым циклом стерилизации выполнять уход за медицинским изделием при помощи средств для ухода KaVo.



## **ОСТОРОЖНО!**

### **Контактная коррозия из-за влаги.**

Повреждения изделия.

- ▶ После завершения цикла стерилизации немедленно выньте изделие из парового стерилизатора!

Медицинское изделие KaVo устойчиво к воздействию температуры 138 °C (280,4 °F).

Можно выбрать подходящую процедуру стерилизации из представленных ниже (в зависимости от имеющегося в наличии автоклава):

- Автоклав с системой трехэтапного форвакуума:
  - не менее 3 мин при 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F)

- Автоклав с гравитационной системой:
  - не менее 10 мин при 134 °C -1 °C/+4 °C (273 °F -1,6 °F/+7,4 °F)
- ▶ Применять согласно инструкции по эксплуатации.

## 7.8 Хранение

- ▶ Подготовленные продукты должны храниться защищенными от пыли в сухом, темном и прохладном помещении, по возможности, стерильном.
  
- ▶ Соблюдать срок годности стерильного материала.

## 8 Вспомогательные средства

Поставляются через специализированную торговую сеть.

Сокращенное наименование материала	№ материала
Запасной ротор, стандартный	1.008.4163
Запасной ротор Mini	1.008.4164
Ключ, стандартный	0.411.3053
Ключ, Mini (нов.)	1.008.6133
Ключ, Mini (стар.)	1.006.3384
Подставка для инструмента 2151	0.411.9501
Игла для прочистки форсунок	1.003.8150

Сокращенное наименование материала	№ материала
Распылительная головка INTRA (вкл. разъем Midwest)	0.411.9911
Пакет Cleanрас 10 штук	0.411.9691

Сокращенное наименование материала	№ материала
Адаптер INTRAmatic (CLEANspray и DRYspray)	1.007.1776
KaVo CLEANspray 2110 P	1.007.0579
KaVo DRYspray 2117 P	1.007.0580
KaVo Spray 2112 A	0.411.9640
Аэрозоль ROTAspray 2 2142 A	0.411.7520



Сокращенное наименование материала	№ материала
QUATTROcare plus Spray 2140 P	1.005.4525

## 9 Гарантийные условия

Для данного медицинского изделия KaVo действуют следующие гарантийные условия:

Компания KaVo гарантирует конечному пользователю безупречное функционирование, отсутствие дефектов материалов или их обработки в течение 12 месяцев со дня выставления счета при соблюдении следующих условий:

При подаче обоснованной рекламации компания KaVo обеспечивает бесплатный ремонт или замену. Любые другие претензии, в частности по возмещению убытков, не рассматриваются. В случае просрочки, грубой небрежности или умысла данное положение действительно лишь в том объеме, в котором оно не противоречит предписаниям действующего законодательства, подлежащим обязательному соблюдению.

Фирма KaVo не несет ответственности за дефекты и их последствия, возникшие или могущие возникнуть в результате естественного износа, ненадлежащего обращения, ненадлежащей очистки, ухода или обслуживания, несоблюдения указаний по эксплуатации или подключению, обызвествления или коррозии, загрязнения подаваемого воздуха или воды, а также химических или электрических воздействий, являющихся необычными или недопустимыми согласно руководствам по применению и другим руководствам фирмы KaVo. Гарантия не распространяется на лампы, световоды из стекла или стекловолокна, изделия из стекла и резины, а также на прочность окраски деталей из пластмасс.

Любая ответственность исключена, если дефекты или их последствия являются результатом модификации изделия клиентом или третьими лицами без соответствующих полномочий от компании KaVo.

Гарантийное обслуживание возможно только при предоставлении документа, подтверждающего его покупку: копии счета или накладной. В документе должны быть приведены данные дилера, дата покупки, тип и серийный номер изделия.

Только следующие отделения сервисного обслуживания KaVo принимают на себя гарантийные обязательства и осуществляют ремонт после истечения гарантийного срока:

**Германия****KaVo Dental GmbH**

Bahnhofstraße 20

D - 88447 Warthausen

Тел.: +49 7351-56-1900

e-mail:

Service.Reparaturen@kavo.com

Интернет-сайт: [www.kavo.com](http://www.kavo.com)**Великобритания****KaVo Dental Ltd.**

Corinium Industrial Estate

Raans Road

UK - Amersham, Bucks. HP6 6JL

Тел.: +44 1 494 733 000

Факс: +44 1 494 431 168

e-mail: [sales@kavo.com](mailto:sales@kavo.com)Интернет-сайт: [www.kavo.co.uk](http://www.kavo.co.uk)

**Испания KaVo Dental S.L.**

Joaquín María López, 41 dpdo.

E - 28015 Madrid

Тел.: +34 91 549 37 00

Факс: +34 91 543 70 54

e-mail: [info@kavoesp.com](mailto:info@kavoesp.com)Интернет-сайт: [www.kavo.es](http://www.kavo.es)**Италия****KaVo Italia Srl**

Via del Commercio 35

I - 16167 Genova-Nervi

Тел.: +39 010 8 33 21

Факс: +39 010 8 33 22 10

e-mail: [kavoitalia@kavo.com](mailto:kavoitalia@kavo.com)Интернет-сайт: [www.kavo.it](http://www.kavo.it)

<p><b>Польша</b></p> <p><b>KaVo Polska Sp.z.o.o.</b></p> <p>UL. Pomorska 251 p.405</p> <p>PL - 92-213 Lodz</p> <p>Тел.: +48 42 675 75 36</p> <p>Факс: +48 42 675 75 35</p> <p>e-mail: <a href="mailto:biuro@kavo.com">biuro@kavo.com</a></p> <p>Интернет-сайт: <a href="http://www.kavo.pl">www.kavo.pl</a></p>	<p><b>Чехия</b></p> <p><b>Republic KaVo CZ spol. s.r.o.</b></p> <p>Lesanska 2a/1176</p> <p>CZ - 141 00 Praha 4</p> <p>Тел.: +420 272 654 566</p> <p>Факс: +420 272 654 732</p> <p>e-mail: <a href="mailto:info@kavo.cz">info@kavo.cz</a></p> <p>Интернет-сайт: <a href="http://www.kavo.cz">www.kavo.cz</a></p>
---	---

**Россия ООО «КаВо Дентал  
Руссланд»**

наб. реки Фонтанки, 130А

190005 Санкт-Петербург

Тел.: +7 812 331 86 96

Факс: +7 812 251 06 55

e-mail: [kavo@kavodental.ru](mailto:kavo@kavodental.ru)

Интернет-сайт: [www.kavodental.ru](http://www.kavodental.ru)









1.011.2593 · kb · 20141119 - 01 · ru



KaVo. Dental Excellence.