

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Optishade - это колориметр, оптоэлектронное устройство, которое позволяет измерять цвета в цветовом пространстве зубов. Optishade работает исключительно с iPhone или iPad (данные устройства не входят в комплект).

ОЧЕНЬ ВАЖНО: Ваш Optishade - это передовое инновационное устройство, с которым нужно обращаться с особой осторожностью. Гарантия не распространяется на проблемы, возникшие в результате неправильного или некорректного использования Optishade (гарантия: 1 год).

Made for

 iPod  iPhone  iPad

Размеры	длина 51 мм диаметр 81,5 мм вес 60 г
Совместим с iOS	iPhone, iPad и iPod Touch Поставляются со следующими двумя кабелями: - Lightning - USB



Smile Line SA
 Z.I. La Clef, 5
 CH-2610 St. Imier
 Switzerland
 +41 32 944 22 44
 mail@smileline.ch
 www.smileline.ch

Дистрибьютор
 Smile Line в России:
 АО ОМНИ МЕД
 ул. Дербеневская
 д.14, корп.3,
 г.Москва 115114
 +7 495 255 16 13
 karies013@mail.ru
 omnimedshop.ru

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 Optishade в комплекте с направляющим конусом и калибровочным колпачком
- 1 кабель для подключения OPTISHADE / iPhone-iPad (Lightning)
- 4 направляющих конуса
- 4 калибровочных колпачка
- 1 буклет с инструкциями по использованию и 1 краткое руководство.
- Приложение Optishade (бесплатное), загружается в Appstore
- 30-дневная бесплатная лицензия на ПО Matisse



НЕ СТЕРИЛИЗУЕМО
 СМОТРИ РАЗДЕЛ ЧИСТКИ И
 ДЕЗИНФЕКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Калибровочная карта находится внутри калибровочного колпачка. Калибровочная карта очень хрупкая и чувствительная. Ни в коем случае не трогайте его пальцами. Калибровочный колпачок нельзя дезинфицировать или стерилизовать. Если вы не уверены в его чистоте или в случае риска перекрестного заражения, немедленно выбросьте его и возьмите новый.

ВНИМАНИЕ! Каждый компонент имеет только одно возможное монтажное положение. Рекомендуется немного потренироваться, чтобы хорошо понимать принципы её установки.


ВНИМАНИЕ! Никогда не пытайтесь открыть корпус Optishade. Он запечатан, и факт его вскрытия аннулирует гарантию производителя. Остерегайтесь попадания жидкости внутрь корпуса вашего Optishade.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Гарантия производителя не распространяется на любые повреждения, вызванные попаданием жидкости в корпус вашего Optishade.


Краткое руководство пользователя



1. Полностью зарядите устройство.

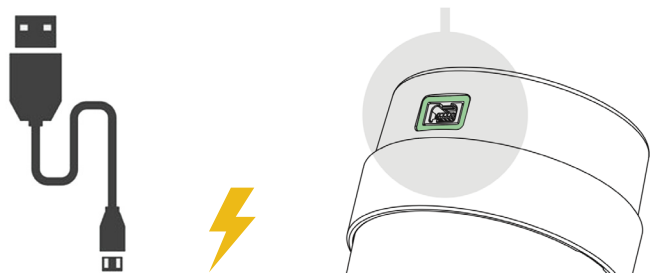

3. Подключите Optishade к устройству iOS и следуйте инструкциям приложения.

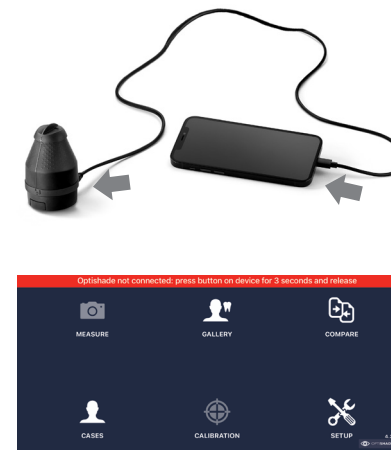

2. Загрузите бесплатное приложение Optishade из App Store.



4. Откалибруйте, снимите крышку и начните измерение.

