



Пример органайзера в работе.
Один внутренний цилиндр открыт, в то время как остальные плотно закрыты и стерильны

Условия стерилизации в автоклаве

- Максимальная температура: 134°C
- Время стерилизации: 5 минут
- Время сушки: 10-15 минут в автоклаве

Для гарантированного продолжительного комфортного использования органайзера вы должны точно следовать указаниям. Температура выше 134 градусов может повредить пластик.



Sincerely, MedicNRG

Autoclavable File Organizer Set



Инструкция по стерилизации органайзера для файлов в автоклаве

Еще больше производительности в эндодонтической работе!

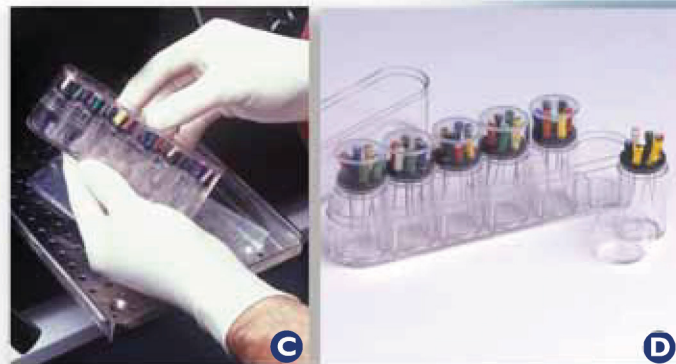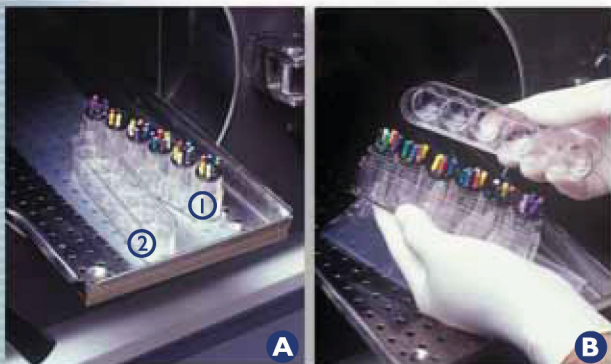

Уважаемый клиент

Ваш Органайзер для файлов подходит как для обычных файлов, так и для файлов NiTi.

Этот органайзер можно стерилизовать в автоклаве. Пожалуйста, точно следуйте этим указаниям:

Процедура:

При установке файлового органайзера в автоклав, откройте основную крышку контейнера с цилиндрами (1) и поместите шесть маленьких крышек внутри основного корпуса (2) (см. Рисунок А). Поместите две части контейнера на стерилизационный рукав или бумажное полотенце. Это предотвращает прямой контакт между металлическим подносом и пластиковым контейнером.

Когда процесс стерилизации будет завершен, аккуратно возьмите основную крышку вместе с крышками цилиндров и под углом соедините их с основной частью органайзера. (см. Рисунок В) Надежно закройте основную крышку (см. Рисунок С)

Теперь ваш органайзер для файлов стерилизован

Чтобы использовать органайзер, откройте только основную крышку. Шесть внутренних цилиндров остаются надежно закрытыми и стерильными (см. Рисунок D).