

Правила пользования и ухода за стоматологическими матрасами, подголовниками и аксессуарами «МЕДТЕКС.РФ»

Благодарим за Ваш выбор торговой марки «МЕДТЕКС.РФ» и желаем приятного пользования!

В Ваших руках находится уникальное изделие из высококачественных и современных материалов. Для продления срока службы продукции, а также сохранения гарантийных обязательств производителя перед покупателем на период первого года эксплуатации¹, Вам потребуется следовать правилам пользования и ухода, описанным ниже.

Защитный чехол

Защитные чехлы для стоматологических матрасов, подголовников и аксессуаров выполнены из полиуретановых материалов, обладающих абсолютной водонепроницаемостью. В связи с этим, запрещается:

1. Оказывать физическое воздействие колюще-режущими предметами на покрытие защитного чехла
2. Оказывать химическое воздействие, отличающимся от протестированных фабрикой-изготовителем водонепроницаемых покрытий, препаратами (см. таблицу в приложении)
3. Воздействовать на покрытие огнем или высокими температурами, не предусмотренными инструкцией по уходу

Допуск нормы

Покрытие защитного чехла абсолютно водонепроницаемо, однако, чехол не является герметичным, поэтому допускается промокание в местах молнии и сшивки изделия.

Наполнитель

Наполнителем в изделиях выступает вязко-эластичный пенополиуретан с памятью формы. Материал не предусматривает возможности по уходу, при этом, перед использованием и на период ухода за защитным чехлом, он требует к себе особого внимания:

1. Перед извлечением изделия из упаковки, убедитесь, что оно находится в пределах комнатной температуры.
2. При извлечении наполнителя из чехла или помещения его вовнутрь, необходимо избегать усилий на разрыв материала наполнителя для сохранения его целостности
3. Избегайте попадания влаги на наполнитель для сохранения характеристик материала
4. Избегайте попадания прямых солнечных (УФ) лучей на наполнитель для сохранения структурной целостности материала
5. Держите наполнитель в условиях ограниченного кислорода во избежание окисления материала (например, в сумке, входящую в комплект поставки или п/э мешок)

Допуск нормы

Наполнитель может содержать незначительные дефекты материала при его производстве, следы временной деформации материала с памятью формы глубиной не превышающих 2 см.

¹отсчет даты начала эксплуатации начинается с момента осуществления продажи, подтвержденных чеком для физ. лиц или товарной накладной для юр. лиц.

Уход и обработка дезинфекционными средствами материалов с ПУ покрытием защитного чехла

Устойчивость к дезинфекционным растворам*				
Денатурированный спирт		90% спирт + 2% эфир		
Фугитивный (летучий) спрей		70% этанол (608 гр./литр), масло 7 гр./литр - 5 минут контакт		
Другие дез.средства		Н.А.С., Reocid, Dettol, Lyorthol Indur Des, Prespect, Nycolin, Clearsol		
Инструкция по уходу				
Стирка до 95 °С	Не отбеливать хлором	НЕ гладить	Химчистка, Р	Сушка в сушильной камере при обычной температуре
30 –кратная стирка с <u>максимальными температурными</u> параметрами без ухудшения качества в соответствии со стандартом ISO 6330				
Автоклав – 130 °С при давлении не более 1,1 Бар				

*В таблице приведены дез. средства, протестированные фабрикой-изготовителем. Допускается использование средств с аналогичным составом. Использование средств, с отличным от указанного, составом, не гарантирует сохранение заявленных характеристик материалов.

ООО «Мед-Текс»
Тел. Бесплатный по России 8 (800) 300-68-20
Санкт-Петербург (812) 627-68-20
Москва (495) 627-68-20
Новосибирск (383) 312-68-20
E-mail: info@med-teks.com
Web: www.med-teks.com