

## **ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

### **Наконечники стоматологические серии MERCURY**

Фошань Джингл Медикал Эквипмент Ко., Лтд

Адрес: 1-2Ф, Плант 4, NO.1, Хуафу Бей Роад, Чачень, 528000, Фошань, Гуандун, Китай

## Инструкция по эксплуатации

### Пневмодвигатель с внутренним охлаждением MERCURY 2000

#### ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации пневмодвигателя необходимо ознакомиться с данной инструкцией, и в дальнейшем строго следовать указаниям, изложенным в ней.



**Наконечник прямой конструкция 3 в одном:** стекловолоконный световод, внутренний двухконтурный спрей вода+воздух, наружный спрей для использования в практике хирургии челюстных костей.

Конструкция этого наконечника собрала в себе все необходимые преимущества для использования стоматологами различных специализаций и применения на разных типах микромоторов. Вы можете без проблем использовать его как на пневматических, так и электрических микромоторах, оснащённых или нет внутренним спреем, а так же с источником света или без.

Так как этот **наконечник имеет и внешний спрей**, он без проблем может использоваться стоматологами-хирургами для костных операций, таких, как синуслифтинг, остеотомию и т.д. на физиодиспенсерах любых производителей. Конструкция его предусматривает использование как длинного стандарта режущего инструмента RA (2.35 для прямого наконечника) так и короткого стандарта CA (2.35 для углового наконечника).

Наконечник **может стерилизоваться в автоклаве**, согласно требованиям к подобным изделиям в запечатанном виде и обязательной предварительной дезинфекцией и смазкой. Смазку необходимо проводить перед каждой стерилизацией, контролируя цвет масла при смазке, он должен быть прозрачный, если он имеет тёмный цвет, то необходимо повторить процесс смазки до появления чистого масла выходящего из отверстия канала режущего инструмента.

При использовании в ортопедической или терапевтической стоматологии смазку необходимо производить не менее одного раза в смену при последующем использовании. **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖЕНИЕ ИЛИ ЗАМАЧИВАНИЕ В ЛЮБЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРАХ!!!**

**Производитель:** Фошань Джингл Медикал Эквипмент Ко., Лтд  
Адрес: 1-2Ф, Плант 4, NO.1, Хуафу Бей Род, Чачень, 528000, Фошань, Гуандун, Китай  
**По ремонту и техническому обслуживанию обращаться к продавцу**

## Гарантийный талон

Номер пневмодвигателя \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

Покупатель, с правилами эксплуатации и условиями гарантии

ознакомлен \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_ М.П.

Сведения о ремонте

\_\_\_\_\_