

**Таблица применения материалов в технике прессования под давлением**

| Наименование  | Материал                                 | Рекомендуемая толщина | Характеристики материала        | Соединение с пластмассой | Рекомендуемая пластмасса      | Рекомендуемая изоляция                                |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| Противохраповая шина  | DURAN®                                   | 2,0 мм                | Жесткий, эластичный             | да                       | DURASPLINT®<br>DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® foil  |
|   | DURAN® +                                 | 2,0 мм                | Жесткий, эластичный             | да                       | DURASPLINT®<br>DURASPLINT® LC | -   |
|   | DURASOFT® pd с пленкой<br>DURASOFT® seal | 1,8 / 2,5 мм          | Двухслойный<br>(жесткий/мягкий) | да                       | DURASPLINT®                   | ISOFOLAN® foil  |
| Прикусной шаблон  | IMPRELON® белый,<br>прозрачный           | 2,0 / 3,0 мм          | Жесткий,<br>не эластичный       | да                       | DURASPLINT®                   | ISOFOLAN® foil  |
| Каппа для отбеливания   | BIOPLAST® bleach                         | 1,0 мм                | Мягкий,<br>эластичный           | нет                      | -                             | BIOPLAST® Изолирующая<br>жидкость/ смачивание водой * |
|   | COPYPLAST®                               | 1,0 мм                | Вязкопластичный                 | нет                      | -                             | Смачивание водой или Spacer<br>foil                   |
| Каппа для не прямой<br>фиксации брекетов                                      | COPYPLAST®                               | 0,5 / 0,75 мм         | Вязкопластичный                 | нет                      | -                             | Смачивание водой или Spacer<br>foil                   |
| Литьевые колпачки   | HARDCAST®                                | 0,4 / 0,6 / 0,8 мм    | Вязкопластичный                 | нет                      | -                             | Spacer foil   |
| Косметическая каппа   | DURAN® + A2                              | 0,5 - 0,75 мм         | Жесткий,<br>эластичный          | да                       | Материал для<br>виниров       | -   |
|   | DURAN® + white pd (белый)                | 0,5 - 1,00 мм         | Жесткий,<br>эластичный          | да                       | Материал для<br>виниров       | -   |
| Каппа для отбеливания /<br>протравки  | COPYPLAST®                               | 1,0 мм                | Вязкопластичный                 | нет                      | -                             | Смачивание водой или Spacer<br>foil                   |
| Каппа для<br>реминерализации  | DURAN®                                   | 1 / 1,5 мм            | Жесткий,<br>эластичный          | да                       | -                             | BIOPLAST® (для сохранения<br>пространства)            |
|   | DURAN® +                                 | 1 / 1,5 мм            | Жесткий,<br>эластичный          | да                       | -                             | BIOPLAST® (для сохранения<br>пространства)            |
| Планирование лечения /<br>диагностика бруксизма                               | BRUX CHECKER®                            | 0,1 мм                | -                               | -                        | -                             | -   |
| Иммедиат-протез /<br>временный зубной<br>протез                               | BIOCRYL® розовый или<br>прозрачный       | 2,0 / 3,0 мм          | Ударопрочный                    | да                       | BIOCRYL® RESIN                | ISOFOLAN® foil  |
| Индивидуальная<br>слепочная ложка,<br>функциональный оттиск<br>индивид. ложки | IMPRELON® clear<br>прозрачный            | 2,0 / 3,0 мм          | Жесткий,<br>не эластичный       | да                       | DURASPLINT®                   | ISOFOLAN® foil или Foam<br>Discs                      |
|   | IMPRELON® opaque<br>молочный             | 3,0 мм                | Жесткий,<br>не эластичный       | да                       | DURASPLINT®                   | ISOFOLAN® foil или Foam<br>Discs                      |

| Наименование   | Материал  | Рекомендуемая толщина | Характеристики материала              | Соединение с пластмассой | Рекомендуемая пластмасса      | Рекомендуемая изоляция                             |
|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Изолирующая пленка                                       | ISOFOLAN®   | 0,1 мм                | Вязкопластичная изолирующая пленка    | нет                      | -                             | -  |
| Невидимый ретейнер / ортодонтическая каппа               | DURASOFT® pd с пленкой DURASOFT® seal               | 1,2 мм                | Двухслойный (жесткий/мягкий)          | да                       | DURASPLINT®                   | ISOFOLAN® foil                                     |
|  | DURAN®  | 0,4 – 1,0 мм          | Жесткий, эластичный                   | да                       | DURASPLINT®<br>DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® foil                                     |
|  | DURAN® +  | 0,4 – 1,0 мм          | Жесткий, эластичный                   | да                       | DURASPLINT®<br>DURASPLINT® LC | -  |
|  | IMPRELON® S pd                                      | 0,5 – 1,0 мм          | Жесткий, эластичный / ударопрочный    | Не рекомендуется         | -                             | ISOFOLAN® foil                                     |
|  | COPYPLAST® C  | 1,0 мм                | Вязкопластичный                       | нет                      | -                             | Смачивание водой или Spacer foil                   |
| Терапевтическая шина                                     | DURAN®  | 1,0 мм                | Жесткий, эластичный                   | да                       | DURASPLINT®<br>DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® foil                                     |
|  | DURAN® +  | 1,0 мм                | Жесткий, эластичный                   | да                       | DURASPLINT®<br>DURASPLINT® LC | -  |
| Дублирующие формы  | BIOPLAST® (plaster)                                 | min. 3,0 мм           | Мягкий, эластичный                    | нет                      | -                             | BIOPLAST® Изолирующая жидкость/ смачивание водой * |
|  | COPYPLAST® (resin)                                  | 2,0 мм                | Вязкопластичный                       | нет                      | -                             | Смачивание водой или Spacer foil                   |
| Защитное покрытие для модели                             | Coating foil  | 0,15 мм               | Соединяется с ортодонтической моделью | -                        | -                             | -  |
| Пресс-форма для временных коронок и мостовидных протезов | COPYPLAST®  | 0,5 - 2,0 мм          | Вязкопластичный                       | нет                      | -                             | Смачивание водой или Spacer foil                   |
| Защитная каппа, спортивная каппа                         | BIOPLAST®   | 1,0 – 5,0 мм          | Мягкий, эластичный                    | нет                      | -                             | BIOPLAST® Изолирующая жидкость                     |
|  | BIOPLAST® XTREME / XTREME PRO                       | 4,0 / 5,0 мм          | Мягкий, эластичный                    | нет                      | -                             | BIOPLAST® Изолирующая жидкость                     |
| Окклюзионная шина / Шина от бруксизма / Минипластина     | DURAN®  | 1,0 - 1,5 мм          | Жесткий, эластичный                   | да                       | DURASPLINT®<br>DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® foil                                     |
|  | DURAN® +  | 1,0 – 1,5 мм          | Жесткий, эластичный                   | да                       | DURASPLINT®<br>DURASPLINT® LC | -  |
|  | DURASOFT® pd ( по желанию с пленкой DURASOFT® seal) | 1,8 мм                | Двухслойный (жесткий/мягкий)          | да                       | DURASPLINT®                   | ISOFOLAN® foil                                     |

| Наименование   | Материал                          | Рекомендуемая толщина           | Характеристики материала           | Соединение с пластмассой | Рекомендуемая пластмасса   | Рекомендуемая изоляция           |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| OSAMU – ретейнер (комбинация BIOPLAST® и IMPRELON® S pd)                     | BIOPLAST®                         | 1,5 мм                          | Мягкий, эластичный                 | нет                      | -                          | BIOPLAST® Изолирующая жидкость   |
|  | IMPRELON® S pd с клеем QSAMU-Bond | 0,75 мм                         | Жесткий, эластичный / ударопрочный | нет                      | -                          | -                                |
| Позиционер   | BIOPLAST®                         | 2,0 – 5,0 мм                    | Мягкий, эластичный                 | нет                      | -                          | BIOPLAST® Изолирующая жидкость   |
| Ретейнер / Расширяющая пластина  | BIOCRYL® C                        | 2,0 / 3,0 мм для нижней челюсти | Ударопрочный                       | да                       | BIOCRYL® RESIN             | ISOFOLAN® foil                   |
| Радиоконтрастная каппа   | BIOCRYL® Form X                   | 1,5 мм                          | Вязкопластичный                    | нет                      | -                          | Spacer foil                      |
| Ретенционная каппа / Долгосрочный ретейнер                                   | COPYPLAST® C                      | 1,0 мм                          | Вязкопластичный                    | нет                      | -                          | Смачивание водой или Spacer foil |
|  | DURAN®                            | 0,75 / 1,0 мм                   | Жесткий, эластичный                | да                       | DURASPLINT® DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® foil                   |
|  | DURAN® +                          | 0,75 / 1,0 мм                   | Жесткий, эластичный                | да                       | DURASPLINT® DURASPLINT® LC | -                                |
|  | IMPRELON® S pd                    | 0,75 / 1,0 мм                   | Жесткий, эластичный / ударопрочный | Не рекомендуется         | -                          | ISOFOLAN® foil                   |
| Амортизирующая пластина для литевых колпачков                                | Spacer foil                       | 0,1 мм                          | Жесткая изолирующая пленка         | да                       | -                          | -                                |
| Материал для создания полостей в отбеливающих каппах                         | HARDCAST®                         | 0,4 / 0,6 / 0,8 мм              | Вязкопластичный                    | нет                      | -                          | Spacer foil                      |
| Шаблоны для имплантации (препарирование кости и рентгенологический контроль) | DURAN®                            | 2,0 / 3,0 мм                    | Жесткий, эластичный                | да                       | DURASPLINT® DURASPLINT® LC | ISOFOLAN® foil                   |
|  | DURAN® +                          | 2,0 мм                          | Жесткий, эластичный                | да                       | DURASPLINT® DURASPLINT® LC | -                                |
| Временная каппа / Временные коронки и мостовидные протезы                    | DURAN®                            | 0,5 - 1,0 мм                    | Жесткий, эластичный                | да                       | Материал для виниров       | ISOFOLAN® foil                   |
|  | DURAN® + A2 pd                    | 0,5 - 0,75 мм                   | Жесткий, эластичный                | да                       | Материал для виниров       | -                                |