



НОЖ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов НТ-01 «Аверон»

Пер. удостоверение №ФСР 2009/05819 от 06.10.2009

Руководство по эксплуатации АВЕ 240.000.000 РЭ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Нож термоэлектрический для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов НТ-01 «Аверон», ТУ 9452-029-25014322-2004, ОКП 945220, 5.0 (далее - **НТ**).

1.2 **НТ** предназначен для:

- срезания пучков гуттаперчевых штифтов в области устья канала с возможностью конденсации;
- срезания центрального пластмассового штифта при работе с термопластической гуттаперчей;
- локальной, неглубокой гингивотомии при кариозных полостях II класса, тотально разрушенных коронках зубов.

1.3 Особенности

- два вида режущих насадок;
- быстрая смена насадок;
- малые вес и габариты;
- питание от сети переменного тока.

1.4 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25 °С, не более 80 %

1.5 Основные технические характеристики

- электропитание ~220/230В 50/60Гц 200мА
- масса, не более

ручки ножа	80 г
блока питания	600 г
- габариты блока питания, не более 65x100x95 мм

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- блок питания ~220/+12В 1 шт
- ручка ножа 1 шт
- насадка **1.0У НТ** (узкая 1,3 мм, белая) 1 шт
- насадка **1.0Ш НТ** (широкая 1,8 мм, синяя) 1 шт
- Руководство по эксплуатации АВЕ 240.000.000 РЭ

Нанесенная маркировка по безопасности:



- До начала работ внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации



- Рабочая часть типа В



- Изделие класса II

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Проверять перед работой надежность установки насадки в ручку.

Остерегаться прикосновения к нагретой части насадки.

4 УСТРОЙСТВО


1 – блок питания

2 – ручка ножа

3 – насадка

4 – кнопка включения/выключения

5 – светодиод для подсветки рабочей части

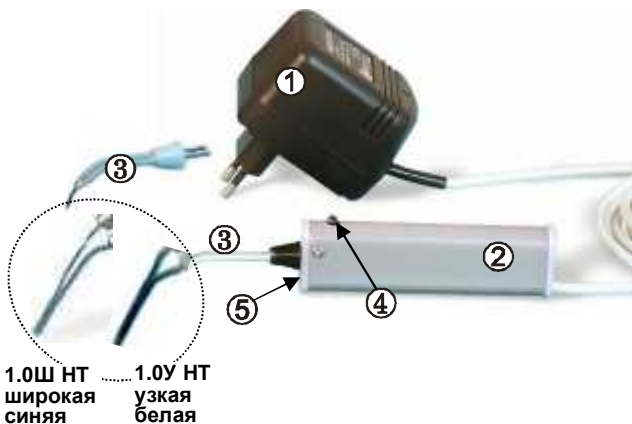

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Подготовка

Установить насадку (3) в ручку (2).

Внимание !



Рекомендации

Для надежной фиксации насадки (при износе, усталости контактов в ручке или ослаблении фиксации по другим причинам) слегка подогнуть контакты.

5.2 Работа

- подключить блок питания (1) к розетке ~220/230В 50/60Гц;
- нагрев включается на время удержания кнопки (4) на ручке (2), при этом загорается светодиод (5);
- по окончании работ отсоединить **НТ** от сети.



5.3 Предупреждения и рекомендации

Не деформировать рабочую часть насадки во избежание ее обрыва.

Внимание !



Изделие укомплектовано блоком питания с диаметром штырей евровилки 4 мм. Необходим контроль надёжности контакта вилка-розетка, особенно, после включения в эту розетку вилок с более толстыми штырями.

Повторное включение не ранее, чем через 1 мин.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование **НТ** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50 до 50°C, относительная влажность до 100% при температуре 25°C.

6.2 **НТ** должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд при температуре от минус 50 до 40°C и относительной влажности до 98% при температуре 25°C. Не допускается хранение **НТ** совместно с кислотами и щелочами.

7 ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Методы дезинфекции, стерилизации съемных насадок – химические, по МУ 287 113-00.

Очистку корпуса **НТ** производить отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания жидкости внутрь **НТ**. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

8 ГАРАНТИИ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие Ножа термоэлектрического для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов **НТ-01 «Аверон»** требованиям технической документации в случае соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему руководству.

8.2 Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 6 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности **НТ**.

Гарантия не распространяется на сменные насадки.

8.3 Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного изготовителем доступа в конструкцию.

8.4 Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену **НТ** в течение гарантийного срока эксплуатации по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего руководства, копии документа, подтверждающего покупку (чек, платежное поручение), комплектации изделия:

- для замены – согласно покупной комплектации, в упаковке изготовителя;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

Изготовитель:

**620102, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»
бесплатный звонок по России 8 804 333-19-20
тел. (343) 234-65-86, 311-11-21, факс (343) 234-65-72
сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

Адреса сервисных представительств, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также ремонт оборудования АВЕРОН:

МОСКВА **АВЕРОН-М** **(495) 785-93-48**
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ **АВЕРОН СЕВЕРО-ЗАПАД** **(812) 301-01-11**
ТАГАНРОГ **АВЕРОН-ЮГ** **8-988-252-17-68**

АЛМАТЫ **ЛУЧ** (10-77-272) 742-998, ф. 740-157
АРХАНГЕЛЬСК **ИНМЕД** (8182) 633-152, 633-174, ф. 633-202
АСТРАХАНЬ **ЧП САВИН** (8512) 382-867, ф. 383-584
БАКУ **АРАШ** (10-99-412) 972-216, ф. 977-689
БАРНАУЛ **СИБ. СТОМ. КОМПАНИЯ** (3852) 200-781, 200-782
БЕЛГОРОД **ВЛАДМИВА** (4722) 313-508, 262-683 ф. 313-502
БИШКЕК **ИП ГРЕЦОВ** (10-996) 555-77-57-80
ВЛАДИВОСТОК **ДЕНТАЛЬ СЕРВИС** (4232) 418-094, ф. 418-510
ВОЛГОГРАД **ИП АЛЕКСАНДРОВ** (8442) 377-738, 339-325ф. 338-994
..... **РЕНОМЕ** (8442) 385-258 ф. 385-244
..... **ДЕНТАЛ ЕВРОМЕД** (8442) 238-899, ф. 243-724
ВОРОНЕЖ **МЕДИКА-СЕРВИС** (4732) 532-881, ф. 532-466
ЕРЕВАН **ЛЕВАДЕНТ** (10-37410) 455-456
ИРКУТСК **БЛИК-ТРЕЙД** (3952) 291-071, ф. 258-420
ИЖЕВСК **МЕДИЦИНА** (3412) 930-151
КАЗАНЬ **РОКАДА ДЕНТ** (843) 570-68-81, ф. 570-68-80
КАЛИНИНГРАД **ИП УМНОВ** (4012) 642-371, 8-906-213-99-54
КЕМЕРОВО **СТОМЛЮКС СЕРВИС** (3842) 756-350
КИРОВ **АНВЕЛ** (8332) 341-110, ф. 646-744
КОСТАНАЙ **АРЫСТАН ХОЛДИНГ** (7142) 28-19-75
КРАСНОДАР **АЛЛЕКО-КУБАНЬ** (861) 233-29-04, ф. 332-904
КРАСНОЯРСК **КОНТАКТ** (39175) 2-17-02, 2-16-80, ф. 2-17-79
..... **МЕДИА** (3912) 586-880, ф. 365-773
МИНСК **ЛОДЭ-С** (10-37-517) ф. 284-17-95
..... **БЕЛМЕДПОСТАВКА** 8-10-375017-247-1298
МОСКВА **СТОМАТОРГ СЕРВИС** (495) 205-33-69, ф. 744-34-80
НОВОСИБИРСК **ИНВЕРСИЯ** (383) 236-40-20, ф. 236-40-21
Н-НОВГОРОД **ФАРМАСТОМ** (831) 439-32-71
ОМСК **ИП МАЛЫШКИН** (3812) ф. 247-333
ОРСК **СТОМАКС** (3537) 272-893, ф. 272-894
..... **ДЕНТПРОМ** (3537) 31-51-08
ПЕРМЬ **СТЭЛС** (342) 294-01-91, ф. 242-21-51
..... **МЕДИКА** (342) 216-66-65, ф. 206-59-09
..... **ИП СИДОРОВ** (342) 238-36-27, ф. 238-38-27
САМАРА **ИНВЕРСИЯ** ф. (846) 373-80-00
САРАТОВ **ЕВРОСТОМ** (8452) 522-590, ф. 522-582
СТАВРОПОЛЬ **МЕДТЕХСЕРВИС** (8652) 460-114, 565-818, ф. 565-111
ТАШКЕНТ **SVID** (10-99-871) 173-02-02, 173-19-35
ХАБАРОВСК **СТОМА-ДЕНТАЛЬ** (4212) 46-00-70 (71), ф. 46-00-72 (73)
ХАРЬКОВ **РЕГАРД** (10-38-057) 756-02-97, 738-09-53
ЧЕЛЯБИНСК **СТОМАТЕХ** (351) 260-86-65
ЯРОСЛАВЛЬ **МЕДТЕХСЕРВИС** (4852) 581-831, ф. 581-832

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Ножа термозлектрического для обрезки гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых каналов НТ-01 «Аверон» требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

5.0

Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	<hr style="border: none; border-top: 1px solid black;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> м.п. (подпись) </div>
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.