

**ИНСТРУКЦИЯ
ПОРОШОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ НАЛЕТА И ПОЛИРОВКИ
ЗУБОВ «Омни Флоу»**

**Софт, вишневый, лимонный, черная смородина
РУ №ФСЗ 2009/05017 от 26 августа 2009 года**

ПОКАЗАНИЯ

Порошок «Омни Флоу» предназначен для удаления налета и мягких отложений с наддесневой поверхности зубов, с оголенного корня; очистки фиссур перед герметизацией; удаления пигментаций, налета курильщика и щадящего отбеливания эмали, не приводящих к гиперестезии зубов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость. С осторожностью применять к пациентам с аллергическими реакциями на пищевые ароматизаторы.

Ни при каких обстоятельствах не должны проходить данные процедуры пациенты, страдающие хроническим бронхитом или астмой. Струя воздуха и порошка может привести к затруднениям с дыханием.

Не использовать не по назначению.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Порошок «Омни Флоу» применяется по методу пескоструйной обработки воздушно-водно-абразивной струей.

Порошок эффективно очищает твердые ткани, отбеливает и придает зубам здоровый блеск.

В качестве абразивного компонента используется смесь карбоната и фосфата кальция с бикарбонатом натрия размером частиц 50-70 мкм, что позволяет провести щадящую чистку эмали.

Порошок выпускается с различными вкусами (лимон, вишня, черная смородина)

«Омни Флоу софт» нейтральный порошок без ароматизаторов, содержит глицин. Размер частиц 50-60 мкм

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошок «Омни Флоу» применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа для полирования зубов или к наконечникам импортного и отечественного производства: KaVo Profi Flex 3, Satelec Air-max, Air-Flow Handy, NSK Prophy-Mate neo, Air prophy unit.

Перед применением порошков необходимо врачу и пациенту защитить от пыли глаза очками и волосы - одноразовой шапочкой, предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента следует обработать вазелином, поместить слюноотсос в угол рта пациента, использовать «пылесос».

Перед применением резервуар необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента.

Не направляя струю порошка в одну точку, а распыляя круговыми движениями, следует обрабатывать каждую поверхность зуба не более 4 секунд.

Избегать попадания влаги в порошок!

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок

Лимон 300 г

Вишня 300 г

Черная смородина 300 г

Нейтральный SOFT без ароматизаторов 200 г

Не следует хранить порошок вблизи кислот или источников тепла.

Срок годности указан на упаковке.

Производитель:

Омнидент Дентал-Хандельсгезельшафт мбХ, Германия
Omnicident Dental-Handelsgesellschaft mbH? Gutergring 7-9,
63110 Rodgau/Nieder-Roden, Germany