

# Сильная команда

## Ежедневно Orotol Plus:

2% (20 мл/литр воды)

Дезинфекция/Очистка

Применение после завершения работы,  
при большой загрузке 2 х в день  
(в обед, вечером)



## Еженедельно MD 555:

5% (50 мл/литр воды)

Специальный чистящий препарат

Применение 1 – 2 х в неделю  
(напр., по вторникам и четвергам),  
при большой загрузке ежедневно перед обедом

1. Для предварительной очистки: аспирировать 2 литра воды
2. Приготовление раствора в системе ухода.\*  
Для одной установки: 20 мл (1 колпачок)  
развести в 1 литре холодной воды, перемешать  
(для двух установок - двойное количество)
3. Подсоединить аспирационные шланги на систему ухода,  
аспирировать раствор
4. Вновь подготовить 1 литр раствора и разделить его на не более  
чем четыре плевательницы
5. Оставить для воздействия минимум на 1 час либо на ночь
6. После истечения времени воздействия/на следующее утро  
аспирировать два литра воды

1. Для предварительной очистки: аспирировать 2 литра воды
2. Приготовление раствора в системе ухода.\*  
Для одной установки: 50 мл (2,5 колпачка)  
развести в 1 литре холодной воды, перемешать  
(для двух установок - двойное количество)
3. Подсоединить аспирационные шланги на систему ухода,  
аспирировать раствор
4. Вновь подготовить 1 литр раствора и разделить его на не более  
чем четыре плевательницы
5. Оставить для воздействия сроком от 0,5 до двух часов  
(обеденный перерыв)
6. После истечения времени воздействия аспирировать два литра

\* Применение системы ухода с адаптерами для аспирационных шлангов для аспирации смеси раствор-воздуха. Аспирация без соответствующего адаптера из стакана или подобной емкости не обеспечивает очистки и дезинфекции. Мы рекомендуем применение OroCup.