

schülke -†



Ротасепт®

Дезинфекция вращающихся инструментов, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой в стоматологии ручным способом и в ультразвуковой установке. Без альдегида.

Наше преимущество:

- Отлично переносится материалами
- Более короткое время экспозиции в ультразвуковых установках
- Содержит компоненты, защищающие от коррозии

Тип препарата

Ротасепт® готовый к применению дезинфицирующий препарат на основе спиртов и едкого калия.

Область применения

Средство предназначено для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным и механизированным (в ультразвуковой установке) способами вращающихся стоматологических инструментов (боры зубные, фрезы, дрельборы зубные, головки стоматологические алмазные и т.п.) в лечебно – профилактических учреждениях.

Антимикробная активность

Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов, вирусов (включая вирусы гепатита В, ВИЧ, вируса полиомы SV40, адено- и полиовирусы)

Данные о препарате

Состав

100 г Ротасепта® содержат: 1,6 г гидроксида калия, 10,0 г 2-пропанола, 0,1 г 2-этилгексанола
Прочие ингредиенты: < 5 % безыонные тензиды

Физико-химические данные

Ротасепт®

Внешний вид:	прозрачная бесцветная жидкость
pH:	~ 13,7
температурная стабильность:	- 5 °C до + 40 °C

Форма поставки

Флаконы 2 л
Канистры 5 л

Принадлежности / дозаторы

Дозатор на флакон 2 л (1 доза = 20 мл)
Кран для канистры 5 л
Ключ для канистры 5 л
Дозатор для канистры (1 доза = 20 мл)
S&M бокс для боров

Концентрация / экспозиция

Ротасепт®

Бактерии (вкл. Туберкулез / M.terrae) и грибы	30 мин неразбавл.
Бактерии (вкл. Туберкулез / M. туберкул.), грибы с ультразвуком	15 мин неразбавл.
Ограниченная вирулицидность* (вкл. ВИЧ, гепатит А – Е), вирулицидность*	15 мин неразбавл.

немецкий стандарт.

*) в соответствии с рекомендациями института им. Роберта Коха:

- ограниченная вирулицидность = активность в отношении вирусов в оболочке
- вирулицидность = активность в отношении вирусов в оболочке и без оболочки

Методы применения и указания по применению

Инструменты погружают в раствор сразу же после их применения, не допуская высыхания на них загрязнений. Толщина слоя средства над инструментами должна быть не менее 1 см.

Дезинфекция инструментов совмещена с предстерилизационной очисткой и проводится в одном рабочем цикле.

Не смешивать с другими очищающими средствами. После окончания дезинфекционной выдержки инструменты вынимают из раствора – НЕ промывать водой, чтобы избежать образования коррозии, - пинцетом раскладывают на салфетке до полного высыхания.

Подлежащие дезинфекции инструменты подвергают воздействию средства в течение 30 мин. При ручном способе обработки или в течение 15 мин при механическом способе обработки (в ультразвуковой установке).

Рабочий раствор обновлять ежедневно. Если требуется стерилизация боров, то Ротасепт® смывают проточной водой и инструмент высушивают.

Переносимость материалами

Ротасепт® не использовать для инструментов из синтетических материалов, чувствительных к щелочам и спиртам, из алюминия, а также для инструментов, склеенных синтетической смолой. Для таких инструментов мы рекомендуем Гигасепт® Инстру АФ.

Маркировка по степеням опасности по нормам ЕС

Xi: раздражающее действие.

R36/38: раздражает глаза и кожу.

S26: при попадании в глаза сразу же промыть водой и обратиться к врачу.

Информация по экологии

Ротасепт® легко и полностью поддается биологическому расщеплению и в сточных водах не оказывает отрицательного воздействия на функционирование биологической очистной установки.

Особые указания

Препарат хранить при температуре не выше комнатной. Не применять препарат после истечения срока годности.



Компания SCHÜLKE & MAYR GMBH сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 и DIN EN ISO 13485 (регистрационный номер: 004567MP23). Компания обладает одобренной системой управления состоянием окружающей среды в соответствии с предписанием (Регистрационный номер: D-150-00003).

Представительство Шюлке & Майр в СНГ и России

119606 Москва | Проспект Вернадского 84 | 2-ой гостиничный корпус | Тел: +7(495)436-06-38 / +7(495)436-02-28
Эл.адрес: schuelke_rus@mail.ru

Schülke & Mayr Ges.m.b.H. | 1070 Wien | AUSTRIA | Tel: +43(1)523 25 01 | Fax: +43(1)523 25 01 60 | e-mail: office.austria@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH | 22840 Norderstedt | GERMANY | www.schuelke.com