


Фото-протокол

Для зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов




Остерегайтесь пересушивая зуб! После контакта с воздухом зуб через 2 минуты начинает пересушиваться, если Вы не успели сделать фотографию за это время, то необходимо взять фото на следующий день.

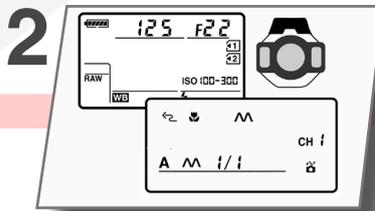


Отключите E-TTL при использовании polar_eyes! Вместо этого используйте ручной режим и установите интенсивность вспышки на 1/1. Качество изображения должно быть установлено на RAW (не JPEG).



Всегда используйте ретракторы и обязательно подтягивайте их назад и вверх к ушам. Матовые черные ретракторы идеальны.

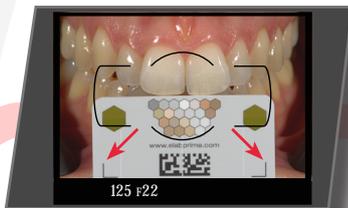


Убедитесь, что карта white_balance расположена в середине кадра и что две нижние метки обрезки полностью захвачены.

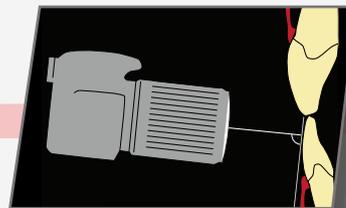

Объектив Должен быть перпендикулярен карте white_balance.



Сделайте кросс-поляризованное изображение с polar_eyes и с картой white_balance, расположенной немного ниже режущего края.

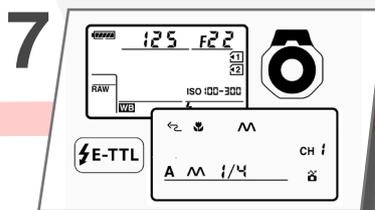

Для отраженных изображений без polar_eyes интенсивность вспышки необходимо снизить до 1/4 в ручном режиме или просто переключиться на E-TTL.



Сделайте одно отраженное изображение, чтобы получить полезную информацию о текстуре и блеске поверхности.



При съемке поляризованного изображения убедитесь, что на фото также запечатлены две нижние метки.



Если объект интереса это латеральный или клык, позицию карты white_balance необходимо скорректировать