


Схема подводок к установке.

Место расположения – в ногах под креслом.

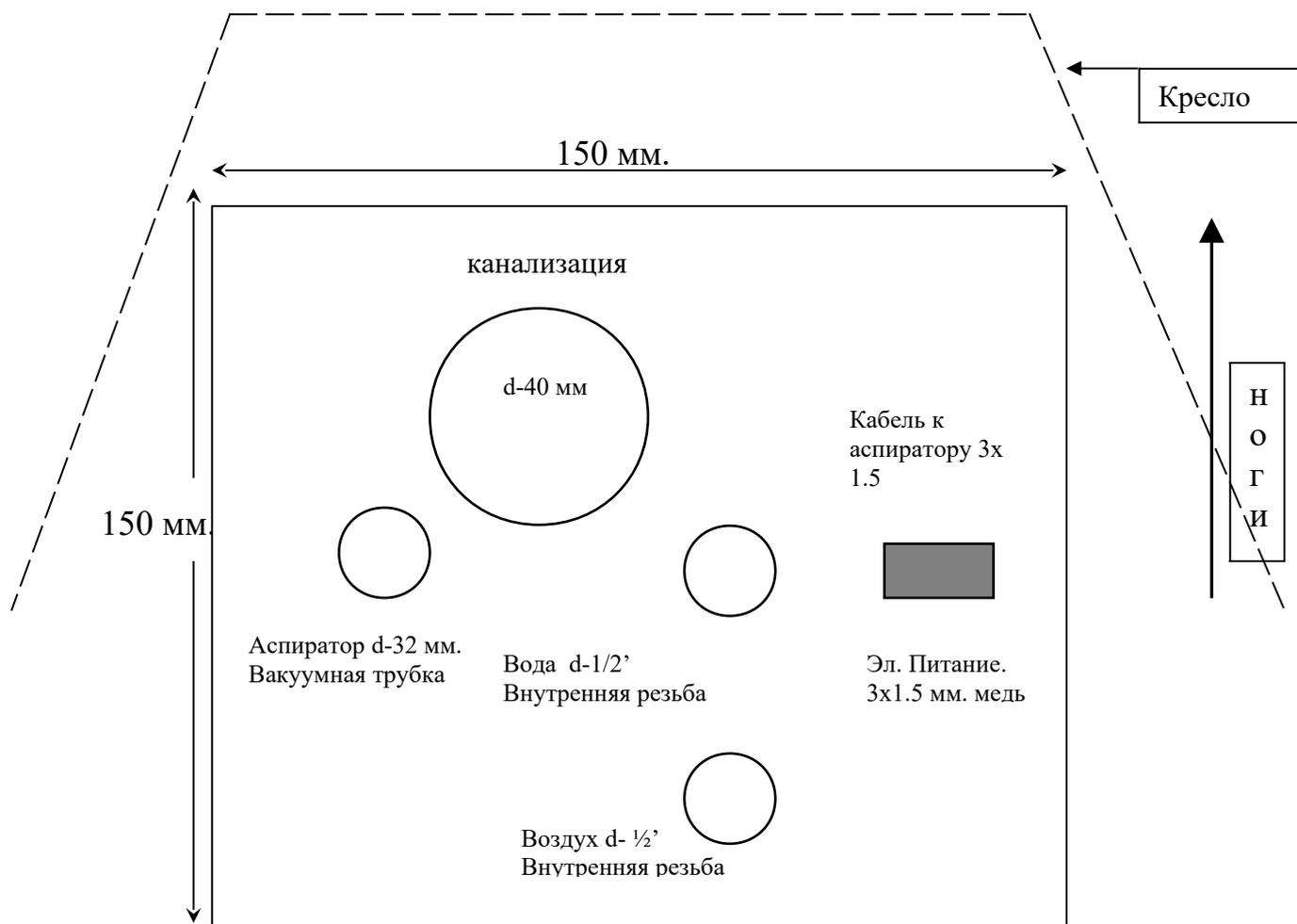

Подводки воды и воздуха должны выступать из пола на 50-60 мм. шаровый кран, выход 1/2 дюйма внутренняя резьба.

Вывод кабеля питания – 500 мм. 3x 1,5 мм

Подводка вакуумного шланга и кабеля питания аспираторного насоса осуществляется от места установки самого насоса к монтажному пятну установки.

Выводы кабеля не менее 500 мм.

Если вакуумная помпа ставится около установки то подводки для вакуума не нужны.