

Глассперленовые стерилизаторы

«TAU QUARTZ 150»

«TAU QUARTZ 500»

**TAU STERIL di Bianchi Giancarlo e C.S.n.c.
Via Gorizia, 6/a - 22073 Fino Mornasco (Co), Italia
tel.: 0039- 31- 92.72.26, fax: 0039 - 31 - 88.07.34
e-mail: info@tausteril.com
www.tausteril.com**

Инструкция по эксплуатации



8. СТАНДАРТНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Внимание, прочитайте инструкцию по эксплуатации
Осторожно, опасность получить ожоги
Осторожно, опасность получить электрошок
Осторожно, наденьте защитные перчатки

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Глассперленовый стерилизатор TAU QUARTZ 150 или TAU QUARTZ 500	1 шт.
2.	Комплект глассперленовых шариков	1 шт.
3.	Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4.	Упаковка	1 шт.
5.	Заводской номер	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Глассперленовые стерилизаторы используются для стерилизации эндодонтических инструментов и мелкого инструментария другого назначения (орто-, медицинских, хирургических, косметических и т.д.)



1.2. Прежде чем использовать аппарат, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

1.3. При покупке аппарата обязательно проверяйте наличие и правильность заполнения гарантийного талона.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стерилизация происходит посредством обработки медицинского инструмента высокой температурой. Для этого используется металлический стакан с наполнителем (стеклянные шарики диаметром 2 мм). Электрический тэн нагревает колбу, в которой находятся инструменты. Передача тепла происходит через наполнитель

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 3.1. Включите стерилизатор кнопкой ON/OFF
- 3.2. Дождитесь, когда погаснет оранжевый индикатор лампочки (стерилизатор набрал нужную температуру)
- 3.3. Откиньте крышку и вставьте рабочую часть инструмента в стакан с наполнителем на время, указанное на передней панели стерилизатора
- 3.4. После окончания стерилизации закройте крышку.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

TAU QUARTZ 150

Внешние размеры, см:	9 x 16 x 11,5;
Размеры колбы, см:	диаметр 4, высота 3,5;
Масса в упаковке, кг:	2
Масса без упаковки, кг:	1,5
Потребляемая мощность, Вт:	85;
Характеристика сети:	230 В, 50 Гц;
Температура стерилизации, °С:	230;
Время стерилизации, сек:	зеркала, зонды - 2; эндоиглы, файлы, боры - 5; хирургические инструменты - 10

TAU QUARTZ 500

Внешние размеры, см:	13 x 16 x 13,5;
Размеры колбы, см:	диаметр 6,2, высота 5;
Масса в упаковке, кг:	2,5
Масса без упаковки, кг:	2
Потребляемая мощность, Вт:	170;
Характеристика сети:	230 В, 50 Гц;
Температура стерилизации, °С:	230;
Время стерилизации, сек:	зеркала, зонды - 2; эндоиглы, файлы, боры - 5; хирургические инструменты - 10.

5. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Аппарат следует хранить в отопляемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С, с относительной влажностью воздуха 80% (при +25 °С), в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.

5.2. Содержите стерилизатор в чистоте. Обработка внешних поверхностей должна производиться в соответствии с действующими нормами и ГОСТами СЭС (42-21-2-85).

5.3. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.

5.4. Сервис и ремонт должны выполняться только квалифицированным сервисным персоналом.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Производитель гарантирует качество изделия, материалов и качество работы в течение **12 месяцев** с момента продажи, при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации и хранения. На протяжении гарантийного срока изделия, определенные нами как дефектные, будут бесплатно отремонтированы либо, по нашему усмотрению, заменены.

6.2 Гарантия является недействительной в случае, если изделие было повреждено в результате аварии, неправильной эксплуатации, а также в случае ремонта или модификаций, произведенных лицами, не уполномоченными производителем. Изделие не является предметом какой-либо иной гарантии, оговоренной или подразумеваемой.

6.3. Аппараты, имеющие механические повреждения ремонту на условиях гарантии не подлежат.

6.4. Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в специально уполномоченных сервисных службах. Доставка изделия в сервисную организацию для гарантийного или послегарантийного обслуживания осуществляется за счёт владельца изделия.

6.5. Изделие принимается в гарантийный ремонт только **при наличии гарантийного талона.**

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Производитель, его представители и дилеры не несут какой-либо ответственности перед потребителями и любыми другими физическими и юридическими лицами за любые возможные или действительные убытки, ущерб или повреждения, прямые или косвенные, причиненные оборудованием, проданным либо поставленным нами, или последовавшие в результате работы или использования оборудования, в том числе какое-либо прекращение услуг, утрату деловых возможностей, или предполагаемых прибылей.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия, не ухудшающие основные технические характеристики. вносить изменения в документацию и публикации, связанные с изделием, без необходимости ставить кого-либо в известность об этих изменениях и дополнениях.