

Педикюрный аппарат

PODOMASTER ***CLASSIC***

Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации




Уважаемый Покупатель,
поздравляем Вас с удачным приобретением!

Для того чтобы работа с педикюрным аппаратом PODOMASTER CLASSIC была удобной, приятной и безопасной, просим внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Желаем успешной работы!

ВНИМАНИЕ

- Продавец не несет ответственности за возможные несчастные случаи или порчу оборудования, произошедшие при его неправильном использовании и несоблюдении руководства по эксплуатации.
- Запрещается включать и использовать изделие лицам, не ознакомившимся с руководством по эксплуатации.
- Перед включением изделия в розетку убедитесь, что требования к напряжению питания соответствуют имеющейся в вашем распоряжении электрической сети.
- Если вы закончили работу с изделием и не планируете включить его снова, рекомендуется выключить основной выключатель и вытащить электрический провод из розетки.
- Запрещается использование изделия в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи открытого огня или нагревательных приборов: это опасно из-за угрозы поражения электрическим током.

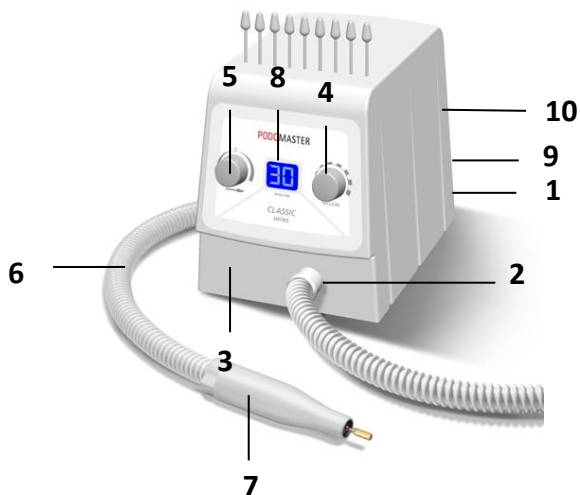

1. ВКЛЮЧЕНИЕ (ON/OFF)
На задней панели аппарата
2. РАЗЪЕМ ДЛЯ ТРУБКИ ВСАСЫВАНИЯ
(плотно соединен с крышкой камеры для сменного мешка)
3. КРЫШКА КАМЕРЫ ДЛЯ СМЕННОГО МЕШКА
4. ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ВСАСЫВАНИЯ
5. ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ/НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ
6. ТРУБКА ВСАСЫВАНИЯ
7. НАКОНЕЧНИК С МИКРОМОТОРОМ
8. ДИСПЛЕЙ
9. РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕДАЛИ
На задней панели аппарата
10. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Содержание:	Стр.
I. Общие сведения	5
II. Комплект поставки.....	5
III. Начало работы	6
1. Установка сменного мешка и подключение всасывающей трубки	6
2. Включение аппарата.....	6
IV. Общие функции.....	6
1. Регулировка скорости и направления вращения .	6
2. Регулировка мощности всасывания	7
3. Защита от перегрузки	7
4. Замена фильтра	7
5. Защита от перегрева	8
V. Работа с ножным переключателем или педалью регулировки мощности	8
VI. Обслуживание аппарата	9
1. Чистка наконечника микромотора.....	9
2. Чистка рабочего отверстия для фрез	10
3. Замена фрезы.....	11
4. Предохранитель	11
VII. Техника безопасности.....	11
VIII. Хранение и транспортировка	12
IX. Технические характеристики.....	12

I. Общие сведения

Благодарим вас за выбор аппарата PODOMASTER CLASSIC. Устройство предназначено для использования только квалифицированными специалистами исключительно для проведения процедур маникюра или педикюра. При несоблюдении данных рекомендаций все гарантийные обязательства в случае повреждения имущества или причинения вреда здоровью не распространяются.

1. Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.
2. Убедитесь, что аппарат не был поврежден при транспортировке.
3. Сохраняйте упаковку для возможной необходимости в ремонте.
Не используйте аппарат:
 - если есть повреждения на электрическом кабеле или вилке.
 - если аппарат поврежден или его роняли.
 - без сменного мешка для сбора пыли.
4. Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует требуемому (230V/50Hz или 115V/60Hz).
5. Установите аппарат на ровной устойчивой поверхности. Убедитесь, что аппарату ничто не мешает, и имеется достаточно места для циркуляции воздуха в задней части аппарата. Устанавливайте аппарат в сухом и чистом месте. Избегайте мест вблизи любых источников тепла или пара.
6. Избегайте резкого изменения температуры в результате охлаждения устройства. Дождитесь, пока аппарат не достигнет естественной температуры. Эксплуатация аппарата разрешается в помещениях с температурой от +15°С до +40°С.

II. Комплект поставки

- Аппарат
- Наконечник (30,000 об/мин.)
- Подставка для наконечника

Дополнительные аксессуары:

- Педаль регулировки оборотов (не входит в комплект поставки, приобретается отдельно)

III. Начало работы


1. Установка сменного мешка и подключение всасывающей трубки

Всасывающая трубка (6) плотно соединена с крышкой камеры для сменного мешка (3). На внутренней стороне крышки расположены электрические разъемы для подключения микромотора. Вставьте крышку (3) в камеру для сменного мешка таким образом, чтобы электрические разъемы совпали с гнездом на камере. Крышка должна вставляться без приложения особых усилий.

Освободите наконечник микромотора (7) от защитной упаковки и установите его на подставку для наконечника.

2. Включение аппарата


Перед включением аппарата убедитесь, что сетевой кабель надежно установлен и имеет универсальную штепсельную вилку. Перед включением аппарата в розетку убедитесь, что технические параметры соответствуют имеющейся в Вашем распоряжении электрической сети. Вставьте вилку в розетку. Включите аппарат с помощью кнопки ON/OFF (1).

На дисплее (8) начнет мигать значок . Аппарат находится в режиме ожидания и готов к работе.

Теперь Вы можете выставить необходимые для работы параметры и вставить бор (об этом говорится в пункте 3 главы V, на стр. 11).

IV. Общие функции

1. Регулировка скорости и направления вращения

Вы можете выбрать необходимую скорость и направление вращения с помощью поворотного регулятора (5)  вперед-назад.

Цифры на дисплее показывают количество оборотов в минуту.

Если, например, Вам необходимо установить 15 000 об/мин.,

поворачивайте регулятор, пока на дисплее не появится цифра **15**.

Перед тем как изменить направление вращения рекомендуется выключить аппарат или снизить скорость вращения до 10 000 об/мин.


Не меняйте направление вращения во время работы на высоких оборотах микромотора во избежание его перегрузки.

2. Регулировка мощности всасывания

С помощью поворотного регулятора ④ настройте необходимую мощность всасывания. Установка регулятора в средней (экономичной) позиции продлит срок службы всасывающей турбины. При повороте регулятора ④ до позиции “0” работа системы всасывания будет остановлена.

3. Защита от перегрузки

Если мотор наконечника заблокирован или подвергается чрезмерной перегрузке, электронная защита прервет электропитание и микроmotor всасывающей турбины остановится.

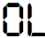На дисплее появится сообщение об ошибке  “HANDPIECE OVERLOAD”.

Работа аппарата будет восстановлена нажатием кнопки ON/OFF ①.

4. Замена фильтра

Своевременная замена фильтра продлевает срок службы всасывающей турбины.

Замену необходимо производить при заметном снижении мощности турбины, но не позднее, чем при заполнении фильтра на 2/3 объема.

При работе с забитым фильтром уменьшается подача воздуха и рабочая температура увеличивается.

Это может привести к выходу из строя всасывающей турбины.

Мешок-фильтр является одноразовым, не пытайтесь вытряхивать его и использовать повторно. Подобное использование может привести к пропуску пыли внутрь камеры. Всегда держите камеру чистой. Это поможет избежать попадания пыли в мотор.

Трубка всасывания ⑥ прочно соединена с крышкой камеры для фильтров ③. Чтобы снять крышку ③ осторожно потяните за разъем трубки всасывания ②. Затем аккуратно снимите мешок, придерживая его таким образом, чтобы избежать высыпания пыли, вытащите трубку. Замените мешок и повторите действия в обратном порядке.

Совет:

Стандартные сменные фильтры для бытовых пылесосов помещаются в камеру для фильтров и в значительной степени способствуют уменьшению запаха.

5. Защита от перегрева

Если температура внутри турбины превысит 80°С, работа системы всасывания и наконечника будет остановлена.

На дисплее появится сообщение об ошибке **OH**.

После того как температура снизится на 10-15°С, данное сообщение исчезнет, и аппарат будет переведен в режим ожидания.

Примечание:

Возможные причины перегрева:

- Блокировка всасывающей трубки или всасывающего наконечника (см. главу V, пункт 1 “Чистка наконечника микромотора”, стр. 9)

- Переполненный фильтр-мешок (см. главу III, пункт 4 “Замена фильтра”, стр. 7)

- Недостаточная циркуляция воздуха на задней панели устройства (см. главу I, стр. 5)

Если упомянутые выше причины исключены, мы рекомендуем обратиться в официальный сервисный центр.

V. Работа с ножным переключателем или педалью регулировки мощности

Для удобства работы могут использоваться ножной переключатель (ON/OFF) или педаль регулировки мощности (не входят в комплект поставки). Они подключаются в специальный разъем на задней панели аппарата (9).

С помощью ножного переключателя (ON/OFF) аппарат включает/выключается с заранее установленным количеством оборотов и мощностью всасывания. При прекращении нажатия на ножной переключатель работа системы всасывания и наконечника будет остановлена.

Использование педали позволяет плавно увеличивать скорость до максимально заданной мощности. При этом максимальной считается предварительно установленная скорость.

Таким образом, увеличение скорости вращения при помощи педали ограничено числом оборотов, указанным на дисплее. Для достижения при помощи педали максимального количества оборотов установите на дисплее максимальную скорость **30** (= 30,000 об/мин.).


При прекращении нажатия на педаль работа системы всасывания и накопника будет остановлена.

VI. Обслуживание аппарата

1. Чистка наконечника микромотора

Наконечник следует чистить как минимум раз в неделю в зависимости от использования.

1. Аккуратно отсоедините наконечник в месте стыковки трубки всасывания и мотора (рис. 1-3)

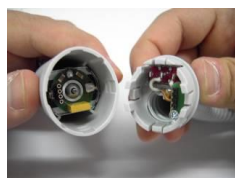

2. Надавите на мотор как показано на рисунке, и достаньте его из корпуса (рис. 4-6). Очистите корпус изнутри при помощи небольшой кисточки и соберите наконечник. Не используйте никаких жидкостей для чистки наконечника.



3. При сборке наконечника убедитесь, что мотор установлен правильно (в соответствии с пазами корпуса), как показано на рисунке 7. Помни-


те, что корректное размещение требует не усилий, а лишь правильного расположения.



4. Когда мотор установлен, соедините наконечник и всасывающую трубку, обращая внимание на разъемы, чтобы избежать повреждения контактов (рис. 8-9).

2. Чистка рабочего отверстия для фрез

Если вы заметили, что механизм не обеспечивает надежное крепление бора, или бор не вставляется до упора, значит, внутри прибора скопилась пыль, и он должен быть очищен согласно следующей инструкции:

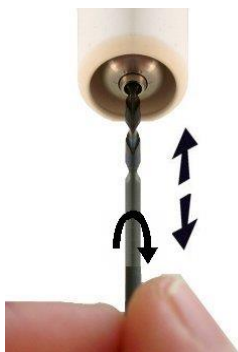

Наконечник поставляется в комплекте со специальным сверлом, предназначенным для чистки патрона.

Осторожно вставьте сверло в патрон, вращая его пальцами по часовой стрелке, затем выньте. Повторите эту операцию несколько раз, пока патрон не будет чистым. Данный способ гарантирует удаление всего скопившегося мусора и пыли из патрона, не повреждая его.

3. Замена фрезы

Убедитесь, что аппарат переключен в режим ожидания нажатием на микропереключатель на кончике (7), прежде чем менять бор. Наконечник оснащен патроном с механизмом «быстрого захвата». Чтобы вставить бор не требуется раскручивать наконечник. Для установки бора просто вставьте его в патрон до упора. Для удаления бора вытащите его из патрона.

Используйте боры с диаметром стержня $\varnothing 2.3$ мм!

Никогда не используйте неотцентрированные, гнутые или поврежденные боры.

Используйте боры с диаметром наконечника не более $\varnothing 6$ мм.

Не превышайте рекомендованную производителем максимальную скорость.

Всегда одевайте защитные очки для предотвращения несчастных случаев.

На высоких оборотах работа мотора наконечника перестает быть плавной, появляется вибрация. Это говорит о том, что патрон, шарикоподшипники или бор могут быть повреждены.

При наличии сомнений всегда используйте скорость, рекомендованную производителем бора.

4. Предохранитель

Предохранитель находится на задней панели аппарата. Для замены предохранителя открутите держатель при помощи отвертки и замените неисправный предохранитель на новый. Предохранитель должен обладать следующими характеристиками: Т 2.5А (при напряжении в сети 115V: Т 5А).

VII. Техника безопасности

Отключайте аппарат перед процедурами очистки или замены предохранителя.

Перед тем как нажать кнопку ON/OFF (1) и выключить устройство, убедитесь, что аппарат находится в режиме ожидания.

Протирайте аппарат мягкой влажной салфеткой. Избегайте попадания влаги вовнутрь. После обработки влажной салфеткой протрите аппарат мягкой сухой тканью.

При попадании жидкости или любого постороннего предмета в аппарат немедленно выключите устройство и выньте вилку питания. Обратитесь к официальному дилеру для получения дополнительной информации и технической помощи до возобновления работы устройства.

Если вы используете боры из инструментальной стали, убедитесь, что используемая вами жидкость для дезинфекции обладает антикоррозийными свойствами.

По вопросам технической помощи, обслуживания и ремонта обращайтесь к официальному дилеру.

VIII. Хранение и транспортировка

Транспортировать только в оригинальной упаковке производителя.

Транспортировать и хранить при температуре: +5 °С - +50 °С

Использовать при температуре: +10 °С - +40 °С

Относительная влажность: max. 90% (без конденсата).

IX. Технические характеристики

Напряжение: 230V/50Hz (115V/60Hz)

Потребляемая мощность: max. 350 Watt

Мотор наконечника: max. 50 Watt/24V/30,000 об/мин.

Габаритные размеры: (Ш x В x Г) 160 x 185 x 240 мм

Размеры наконечника: L = 118 mm, Ø d= 17-27-31 mm

Вес: 2,8 кг (комплект)

Предохранитель: T2,5 A (115V: T5, A)

Класс изоляции:  2  Тип B

Допустимая скорость вращения и диаметры фрез

При работе с аппаратом необходимо внимательно следить за режимом работы аппарата, чтобы скорость вращения микромотора в зависимости от диаметра фрезы не превышала допустимых значений. Невыполнение данных требований может привести:

1. к блокировке блока управления;
2. поломке фрезы;
3. выходу из строя микромотора;
4. причинение вреда здоровью мастеру или клиенту.

