

<p>Аппарат для дентальной визуализации</p> <p>1. Введение Аппарат для дентальной визуализации генерирует свет и обдув, что препятствует запотеванию зеркала и помогает стоматологу сделать снимок полости рта.</p> <p>Имеет 4 зеркала: L Occlusal Mirror – Оклюзионное зеркало L M Occlusal Mirror – Оклюзионное зеркало M Buccal Mirror – Щечное зеркало Lingual Mirror – Лингвальное зеркало</p> <p>2. Технические характеристики Аккумулятор – 1000 мА/ч / 3,7 В На входе: 5 В, 1 А На выходе: макс 1,3 Вт</p> <p>3. Зарядка 3.1 Если свет мигает, недостаточная яркость, либо вентилятор автоматически выключается, пожалуйста, прекратите использование устройства и зарядите батарею. 3.2 Подсоедините адаптер питания к разъему на нижней части устройства и подключите к источнику питания (к розетке). 3.3 Зеленый индикатор мигает в процессе зарядки. Если индикатор выключился, это означает, что зарядка завершена.</p> <p>4. Управление 4.1 Кнопка вентилятора. Нажмите «ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ) для включения/выключения вентилятора. 4.2 Кнопка вентилятора и света. Нажмите «ON/OFF» (ВКЛ/ВЫКЛ) для включения одновременно вентилятора и света.</p>	<p>4.3 Вставьте зеркало в нижний разъем устройства, нажмите на кнопку вентилятора, запустится обдув. Зеркало не будет запотевать. Если освещенность недостаточная, нажмите на кнопку вентилятора и света.</p> <p>4.4 Если аппарат не используется, он автоматически выключится спустя три минуты.</p> <p>4.5 Вытащите зеркало из устройства, продезинфицируйте его в соответствии с данным руководством пользователя.</p> <p>5. Дезинфекция</p> <p>5.1 Основное устройство и зеркала необходимо очищать, дезинфицировать и стерилизовать перед каждым использованием для предотвращения заражения. Это касается, как первичного использования, так и последующих.</p> <p>5.2 После каждого использования все компоненты, которые контактировали с инфекционными агентами должны быть очищены при помощи салфеток, смоченных дезинфицирующими и моющими растворами (бактерицидный, фунгицидный, безальдегидный растворы). Использование химических средств может повредить оборудование.</p> <p>5.3 Зеркало необходимо стерилизовать в автоклаве при температуре 134°C между процедурами.</p> <p>5.4 Основное устройство нельзя стерилизовать в автоклаве.</p>
---	--