


YND-B2L5

Руководство по эксплуатации

Введение

Благодарим вас за выбор нашего светодиодного осветителя, обеспечивающего мощный белый свет, генерируемый светодиодом (CREE LED из США).

Устройство использует литий-ионную аккумуляторную батарею большой емкости. Полного заряда аккумулятора достаточно для 9 часов работы при максимальной яркости.

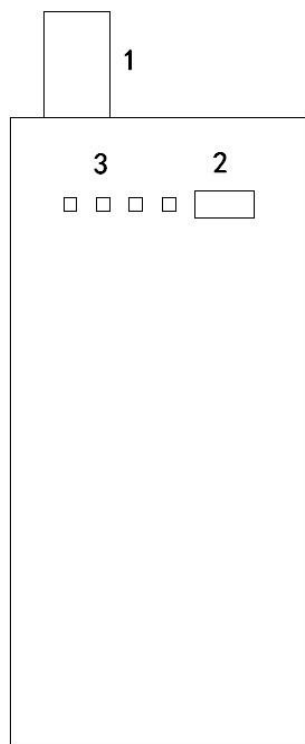

1. Поворотный переключатель и регулировка яркости
2. Индикатор зарядки
3. Индикатор уровня заряда аккумулятора (4 светодиода).

Установка

1. Установка аккумулятора

Подключите адаптер зарядного устройства осветителю и вставьте вилку в розетку. Убедитесь, что индикатор зарядки горит либо красным (идет зарядка), либо зеленым (полный заряд) цветом.

Попадание воды или любых жидкостей может повредить зарядное устройство и аккумулятор осветителя, а также приведет к аннулированию гарантии производителя.

2. Установка светодиодной лампы

Осторожно вставьте вилку в ВЫХОДНОЙ порт аккумулятора. Обратите внимание, что этот провод светодиодной лампы очень мягкий и гибкий, его нельзя тянуть и сгибать.

3. Установка оранжевого фильтра

Осторожно вставьте оранжевый фильтр в верхнюю часть светодиодной лампы, пока не достигнете желаемого положения и высоты.

4. Подключение светодиодной лампы к лупе или рамке

Светодиодная лампа состоит из зажима и регулируемого зажимного элемента. Для настройки угла наклона света используйте отвёртку и отрегулируйте винт.

Технические характеристики

Входное напряжение зарядного устройства:	110–220 В переменного тока, 50–60 Гц
Аккумулятор:	Литий-ионный (с защитной схемой)
Емкость аккумулятора:	4400 мА·ч
Корпус аккумулятора:	Алюминиевый сплав
Мощность света:	Макс. 3 Вт
Цветовая температура:	6300–7000 К
Время зарядки:	Макс. 10 часов
Время работы:	Макс. яркость - 9 часов
Срок службы аккумулятора:	Более 1000 циклов (50% емкости)
Срок службы светодиода:	Более 100 000 часов
Максимальная выходная мощность:	32 000 люкс
Размер пятна:	ок. Ø7 см в 25 см от линз

Работа с устройством

1. Включите устройство и отрегулируйте яркость до необходимой, повернув поворотный переключатель (вкл./выкл.) на устройстве по часовой стрелке
2. Поверните переключатель (вкл./выкл.) в обратную сторону, чтобы выключить устройство, если он не используется.

Чистка и обслуживание

Перед началом работы ознакомьтесь с данным руководством. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций, описанных в данном руководстве.

При максимальной яркости интервал между использованиями должен составлять не менее 30 минут

При обнаружении поломок в устройстве немедленно замените поврежденные детали.

Аккумулятор и светодиодную лампу НЕЛЬЗЯ подвергать обработке в автоклаве.

Для очистки устройства и аккумуляторного блока используйте влажную ткань

Отключайте устройство от сети, когда оно не используется.

Произведите полную зарядку аккумулятора, если устройство не используется в течение длительного времени.

Не используйте адаптер питания для подачи питания на другое устройство.

Не используйте другой адаптер питания для зарядки аккумулятора.

Не производите самостоятельную модификацию или изменение конструкции устройства.

Транспортные расходы за возврат данного продукта продавцу несет покупатель.

Гарантийная замена устройства производится по усмотрению производителя/поставщика.

Ремонт неисправностей, выходящих за рамки гарантийных условий, может быть платным. Транспортные расходы также оплачиваются покупателем.

Послепродажное обслуживание, поддержка и запасные части

Срок гарантийного обслуживания устройства составляет течение 12 месяцев с даты покупки. На аккумуляторную батарею распространяется гарантия в 24 месяца.

Гарантия НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на зажим.

Запасные части можно приобрести за дополнительную плату.

Устройство предназначено для использования в медицинской среде, и гарантия считается недействительной, если оно используется в других целях.

Гарантия также аннулируется при:

- Падении устройства
- Любой механической поломке
- Намеренно вызвано
- Замене частей на детали от другого устройства
- Отсутствию своевременного технического обслуживания устройства
- Контакте с жидкостью любого рода
- Повреждении устройства, вызванного скачком напряжения любого рода
- Истечении гарантийного срока

Комплектация

Светильник	1 шт.
Оранжевый фильтр	1 шт.
Зажим	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Аккумуляторная батарея	1 шт.
Отвертка	1 шт.

Информация об упаковке

Размеры упаковки	8x10x19 см
Вес	около 300 г
Светодиодная лампа	CE
Зарядное устройство	CE; UL; ROHS